

## 「オーエックス」ってどんな会社？

人間用の車いすを企画から生産まで行うメーカー。同時にオートバイや自転車も手がけています。今回のプロジェクトは当社のマスコット犬「モグ」のヘルニアがきっかけとなりスタート。最終仕様様の完成を待たず星になったモグのためにも更なる開発を進めてまいります。



## G a l l e r y



## もう一度、おそとを散歩！

より良いフィット感のために生まれた「着る車いす」。人間用で培ってきたシーティング\*の考えをフィードバックした新しい乗り物。各部に取り付けられたベルトの張り調整により、安定した乗車姿勢、無理のない加重分散を実現。一度調整してしまえば、次からはバックルをカチッとほめるだけで基本姿勢が取れます。目指すのは今までどおりの生活。

※シーティングとは車いす上で正しい姿勢をとるための技術のことです。



**Wilmog<ウィルモグ>メーカー希望小売価格（税別）**  
S: ¥65,000 / M: ¥73,000 / L: ¥77,000

### 安全上のご注意

**警告** 正しく安全にお使いいただくために、ご使用の際に必ず「取扱説明書」をよくお読み下さい。

- ◆ 価格は参考価格です。
- ◆ 本仕様は予告なく変更することがあります。
- ◆ 無断転載禁止。
- ◆ 仕様変更などにより、写真や内容が一部実物と異なる場合があります。
- ◆ 色あいについては、撮影時および印刷条件などにより、実際の色と異なって見えることがあります。

お求めは、技術とサービスを誇る当店で

【動物病院向け販売】  
株式会社 インタナズー・クリニックラブ  
〒151-0063 東京都渋谷区富ヶ谷2丁目-21-15松濤第一ビル3階  
TEL 0120-548-590  
【製造】  
株式会社 オーエックスエンジニアリング  
〒265-0043 千葉県千葉市若葉区中田町2186-1  
TEL 043-228-0777 FAX 043-228-3334  
<http://www.oxgroup.co.jp/> e-mail [sales@oxgroup.co.jp](mailto:sales@oxgroup.co.jp)



**new**  
ウィルモグ  
**Wilmog**

ここが  
新しい！

簡単装着、着崩れしないニューWilmogは、1度合わせればバックルとファスナーをとめるだけの新型ウェアを採用しています。



## リハビリと Wilmog

歩行に衰えが見え始めたら、完全に歩けなくなる前にウィルモグのご使用をおすすめします。これは、ウィルモグを使用することで活動的になり、筋肉の衰えを防ぐことが可能なためです。活動的になると内臓の働きも良くなり、自由に動けることでストレスも発散されるので、非常に良いリハビリとなります。

### 豊富な調整機能

Wilmog のフレームは長さ、高さ、幅などが調整できるから、体型が変わっても安心です。ウェアも同様に各部が調整できるようになっています。



### フットポケット

後足を入れて吊り下げて使います。足を動かせるので、リハビリ効果も期待できます。また、取外して四足歩行時の補助やリハビリも行えます。



### 着脱カンタンNEWウェア

抱きかかえられるワンちゃんなら、バックルとファスナーを開くだけで乗降りが可能です。



らくらく軽量  
1.2kg\*



※Sサイズ重量

### 日常生活に適用

股パッドは取り外して洗うことができます。もちろんオムツを付けた状態でも乗車可能です。



### フレームカラー

ディープブルー  
オレンジ  
ホワイト



### ◇ご注文時の注意事項◇

治療中のワンちゃんの場合は、必ず獣医師にご相談ください。

Wilmogは、前足歩行するタイプの車いすです。前足に障害のあるワンちゃんや、前足が弱っているワンちゃんのご使用には十分注意が必要です。特殊な症状、切断や変形がある場合などは、症状について出来るだけ詳しくおしえて下さい。

※使用中は、ベットから目を離さないでください。

※はじめのうちは長時間の使用を避け、着用部にすり傷などの異常が見られないか様子を見ながら時間を延ばしていきましょう。

### 仕様

商品名： Wilmog(ウィルモグ)

用途： 後肢不自由犬用

サイズ： S/M/L ※()内は犬種目安

フレームカラー： ホワイト/オレンジ/ディープブルー

ウェアカラー： ブラック・グレー

フレーム材質： アルミ

調整機構・幅： 150mm～290mm

胸囲： 260mm～750mm

適合体格： 約3kg～15kg

### ウェアサイズの目安

犬種 サイズ	ミチユカ タックス	コーギー	フレンド ルトック	コッカ ー	ボ メ ラ ン	シ ェ ル テ ィ	シ バ
S	■	■	■	■	■		
M	■	■	■	■			■
L						■	

更に詳しい内容や動画など  
Wilmogホームページをご確認ください。

<http://www.oxgroup.co.jp/dog/>

ウィルモグ

検索