


骨盤サポートチェア My Comfy

RC1210 / RC1220 / RC1230 共通説明書 **保存用**

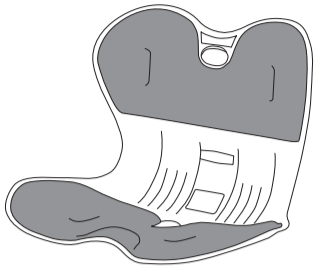

骨盤サポートチェア MyComfyを
お買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前に必ず「安全のための注意事項」を
よくお読みいただき、正しくお使いください。
安全のために、注意事項は必ずお守りください。
お読みになられたあとは必ず大切に保管してください。

安全のための注意事項

ここに示した注意事項は、危害や損害を未然に防ぎ、製品を安全にお使いいただくために示したものです。安全のための表示と図記号の意味は次のように説明していますので、内容をよく読み、理解してから本文をお読みください。

警告

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、
人の死亡または重症を負う可能性が想定される内容を示します。

■ヘルニア等の腰部に疾患のある方、骨粗しょう症の方、
脊柱に疾患のある方、妊娠中の方、体が不自由な方は専門医と
相談のうえ使用してください。

■本製品をご使用后、身体に異常を感じた場合は、
直ちに使用を中止してください。

ご使用方法

ダイニングチェア、ワーク(オフィス)チェア、ソファの上でご使用ください。
ご使用者様によっては、腰のサポートがきつく感じる場合がありますので、
ご使用開始は短い時間でお試しく下さい。




注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が損害を負う可能性が
想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。

- 家庭用ですので、業務用には使用しないでください。
- 本来の用途以外の使い方はしないでください。
- 異常が生じたまま使用しないでください。
- 少しでも飲酒されている方はご使用をお止めください。
- 座ったまま、椅子をひきずらないでください。
床を傷つける恐れがあります。
- 屋外、直射日光の当たる場所、ストーブ等の加熱器の近くで
使用しないでください。熱による損傷、変色、変質等の原因になります。
- 同時に二人以上で使用しないでください。また椅子の用途以外には
使用しないでください。ケガ・破損の原因になります。
- 座面の上にとったり、踏み台代わりに使用しないでください。
ケガ・破損の原因になります。
- 座ったまま激しく動いたり、遊んだりしないでください。
ケガ・破損の原因になります。
- すべりやすい床面で使用しないでください。ケガの原因になります。
- 床に段差や斜面がある場所で使用しないでください。
ケガの原因になります。
- 背もたれに無理矢理よりかからないでください。破損の原因になります。
- むりやり曲げないでください。破損の原因になります。
- 分解や改造をしないでください。
本来の性能を維持できず、破損等の原因になります。

使用上の注意事項

■次のような場所では使用をお控えください。

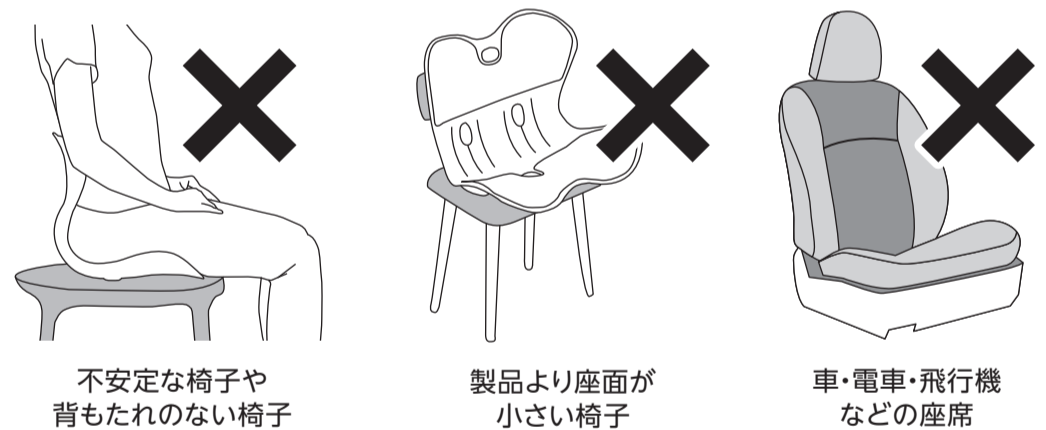

■以下ご注意ください。


- 床に置いて使用する場合は、
チェアが後ろに倒れないよう十分注意してください。
- フローリングや皮張りソファ、畳の上などで使用する場合は、キズ防止のため、カー
ペットや座布団、布などを敷いてから本商品を置いてください(滑り止めのストッパー
部分が突起になっています)。
- 本商品はヒップサイズが最大110cmを想定しております。この範囲を超えますと臀部
が収まらないなどの現象が起こる可能性があります。ご注意ください。

■お子様が使用する際の注意事項(RC-1230)


- 学習時に腰回りをサポートするためにご使用ください。
- 使い方のわからない年齢のお子様の場合、保護者の方がサポートし、一人で使
用させないようにしてください。
- 製品で遊ばせないようにしてください。
- お子様向けのRC1230は身長140cm、体重40kgくらいまで(おおよそ小学校4・5年
生まで)のお子様を対象です。それ以上の体格のお子様はRC1220、RC1210をお使
いください。

機能説明(特徴)

- 腰をサポートする高弾力性素材がきれいな背骨のS字ラインを形作り、姿勢を矯正するチェアです。
- 背もたれと、座面部にはウレタンクッションを使い、長時間の使用でも疲れにくいクッション性を施しています。
- 普段から姿勢が悪い方の場合、骨盤を起こしてくれますので、正しい姿勢をキープできます。

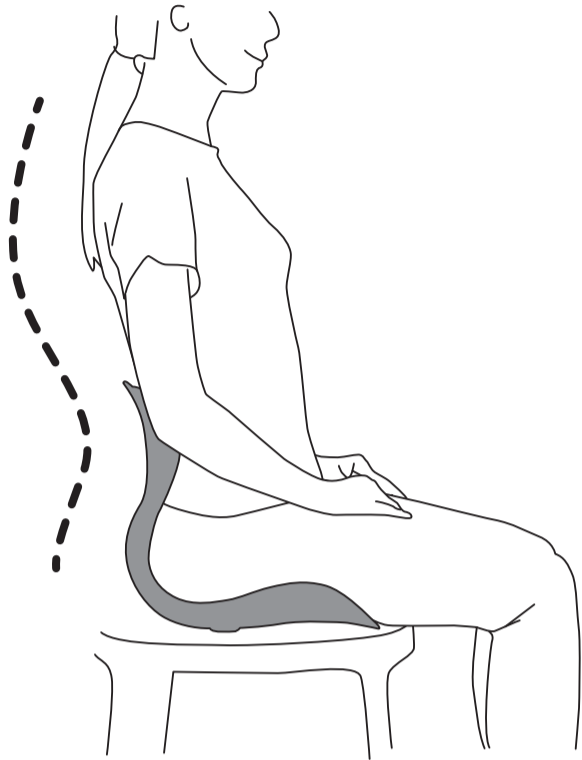

各部説明

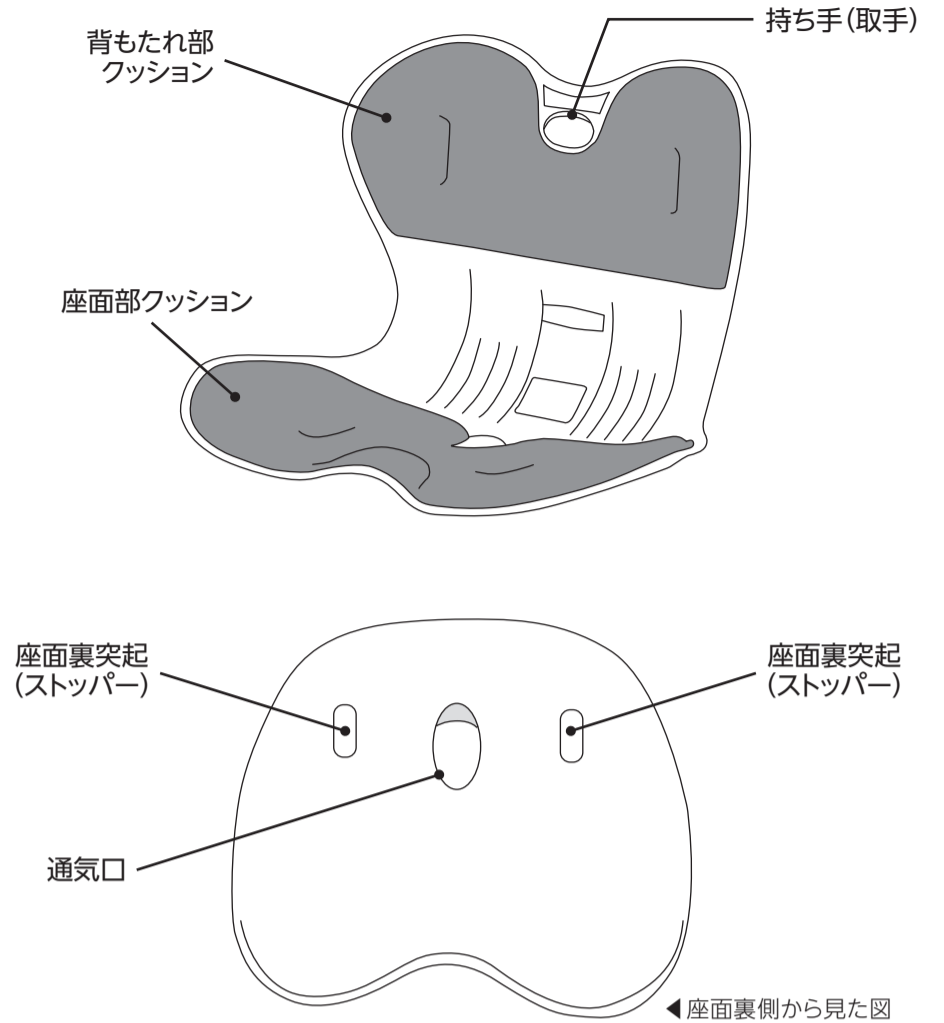

寸法図

RC1210	RC1220	RC1230
<p>高さ31.5 幅43.0 奥行32.5</p>	<p>高さ31.5 幅40.5 奥行32.5</p>	<p>高さ27.0 幅34.5 奥行28.0</p>

お手入れ方法

- 濡れ雑巾をかたくしぼってふいてください。
- クッション部の場合はポンポンと叩くように汚れをとってください。
- ひどい汚れの場合は薄めた中性洗剤を使用してください。
- ベンジン・アルコール等は使用しないでください。
- ふき取り後は風通しの良い場所で乾燥してください。

保管方法

- 直射日光や雨の当たらない場所で保管してください。
- 屋外や40℃以上になるような高温多湿の場所(風呂場、車中等)での保管はしないでください。
- 小さなお子様のいる近くに保管しないでください。思わぬ事故の原因となります。

廃棄時の処置

- 地球環境を守るため、不法投棄はしないでください。
- 廃棄処分される場合は、お住いの自治体の指示に従い処分・廃棄してください。

■お問い合わせ先 商品に関する問い合わせ・アフターサービスは、お買い上げいただきました販売店にご相談ください。

■輸入・販売元 株式会社ドリームウェア 〒160-0023 東京都新宿区西新宿3-11-6
☎0120-133-888 受付時間:平日10:00~18:00(土日・祝日を除く)
<https://www.dreamware.jp/>

品質表示

商品名	骨盤サポートチェア MyComfy	
サイズ	RC1210	幅43.0cm 奥行32.5cm 高さ31.5cm
	RC1220	幅40.5cm 奥行32.5cm 高さ31.5cm
	RC1230	幅34.5cm 奥行28.0cm 高さ27.0cm
構造部材	ナイロン	
クッション材	ポリウレタン	
張り材	ポリエステル100%	
適用体重	RC1210	約100kgまで
	RC1220	
	RC1230	約40kgまで
製造国	韓国	

※ 諸般の事情により、仕様・寸法・カラーなどを予告なく変更することもありますので、あらかじめご了承ください。