




2025年7月15日配信号

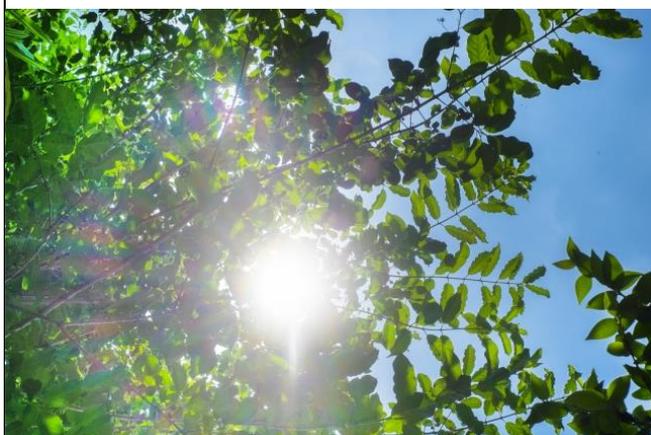

毎日暑い日が続きますが、皆様いかがお過ごしでしょうか？  
事務局の私は、ずっと室内にいたはずなのに、頭痛が激しくなってきたので、エアコンを強くして休んでいたところ、落ち着いてまいりました。熱中症かはわかりませんが、室内であっても気をつけたいな、と痛感した次第です。

## 今号の目次

【ご紹介】新製品のご紹介

【ご案内】真夏を迎えるにあたって気をつけていただきたいこと

## 【ご紹介】

### 新製品 ダンサック ノバライフ TRE™ イレオストミー

既にご使用の方も多いかと思いますが、これまで、コロストミー用、ウロストミー用として展開していたノバライフTRE™シリーズに、この度イレオストミー用の新製品が加わりました。

今回はつい先日発売したばかりの新製品、  
ダンサック ノバライフ TRE™ イレオストミーをご紹介します。

### ①16.5mm の大きな内径のソフトキャップ

- さまざまな性状の排泄物でもスムーズに排出できる
- 排泄物の処理時間の短縮が期待できる
- キャップホルダーにキャップを固定できる
- 開閉しやすく扱いやすい

### ②スマイリーカット

- リリースフィルムが剥がしやすい

### ③不織布

- やわらかい触り心地の新素材

### ④キャップ本体をすっきり収納(肌色のみ)

## ノバライフ TRE™ イレオストミー ストーマ袋の特徴

**スマイリーカット** .....  
リリースフィルムが剥がしやすい。


**不織布** .....  
やわらかい触り心地の新素材

**16.5mmの大きな内径の  
ソフトキャップ** .....

- ・さまざまな性状の排泄物でもスムーズに排出できる
- ・排泄物の処理時間の短縮が期待できる
- ・キャップホルダーにキャップを固定



- ・キャップ本体をすっきり収納(肌色のみ)

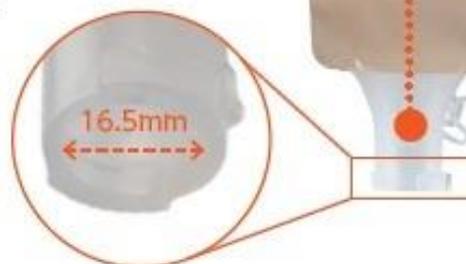

- ・開閉しやすく扱いやすいソフトキャップ

ノバライフ TRE™ イレオストミーに使用されている皮膚保護剤の特徴

### ①優れた吸水性

- 素早い吸水性+ドライロックテクノロジー

### ②即効性のある pH 緩衝作用

### ③パーソナルフィット

- 様々なストーマ形状に対応し、膨潤することでしっかり密着・追従するように  
デザイン

### ④持続する粘着力

### ⑤柔軟性を高める薄型設計

# ノバライフ TRE™ イレオストミー 皮膚保護剤の特徴

## 優れた吸水性




スーパーアブソーバー(ポリアクリル酸ナトリウム)を配合した唯一の第3世代皮膚保護剤<sup>1)</sup>で、従来のハイドロコロイド素材より、水分を素早く、かつ多く吸収できます。  
更にドライロックテクノロジーにより、吸収した水分を吸水コアに閉じ込め、面板貼付に適した皮膚の状態を保つことができます<sup>5)</sup>。



### 素早い吸水性

従来の製品より吸水の速度が速い<sup>6)</sup>

TRE™ 皮膚保護剤およびGX皮膚保護剤に蒸留水250 $\mu$ Lを滴下し、吸水性を比較した結果、60分後にGX皮膚保護剤と比べてTRE™ 皮膚保護剤はより速く吸水しました。

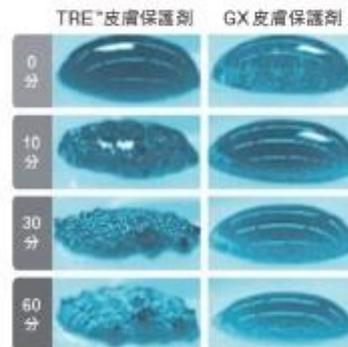

### ドライロックテクノロジー

大量の液体\*を素早く吸収し、吸水コアに閉じ込める<sup>5)</sup>

\* 面積1平方センチメートル当たり0.6グラムの液体




水分を吸水し膨潤して閉じ込める



## 即効性のあるpH緩衝作用

皮膚のpHを正常(弱酸性)に保つことは、アルカリ性の排泄物によるダメージから**皮膚を守る**ことにつながります。

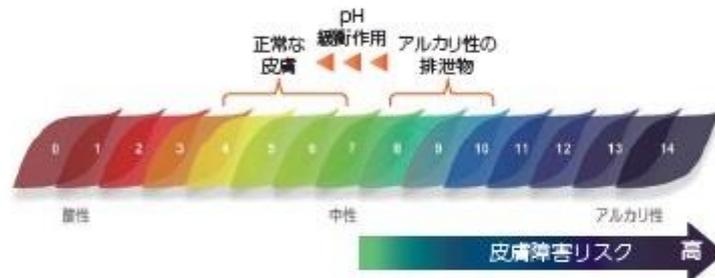

## パーソナルフィット

さまざまなストーマ形状に対応し、膨潤することで、しっかり密着・追従するようにデザイン<sup>1)</sup>

### 豊富なコンベックスインサートと製品ラインアップ

- ・平面に加え、汎用性の高い、深さ6mmの軟性・硬性凸面
- ・さまざまな腹壁に合わせて選べる豊富なコンベックスインサート

コンベックスインサート(イレオストミー)

軟性凸面:5種類

硬性凸面:3種類



## 持続する粘着力

水分を吸収した後も強度を失うことなく、初期タックの強さを長期にわたり維持<sup>7)</sup>

## より薄いデザイン 従来品より36%薄い

従来の1.1mmの hidroコロイド製品に比べ、厚さはわずか  
0.7mm、辺縁部は0.3mm

詳細は下記から。

※ストーマ装具に選択に関しては、医療従事者に相談し、適切なものを選んでいただきますよう。

[ノバライフ TRE™](#)

[イレオストミー](#)

同じ TRE 皮膚保護剤を使用した製品はほかにもバリエーションがあります。

[下記総合カタログも参照ください。](#)

[ダンサック TRE™](#)

[総合カタログは](#)

[こちらから](#)

### 【ご案内】

#### 真夏を迎えるにあたって気をつけていただきたいこと

すでに先月から猛暑日が続いているので、皆様対策済かと思われませんが、改めてお気をつけていただきたいことを記させていただきます。

#### 1. 汗

1-① ① 面板の皮膚保護剤の消耗が早くなる。

今までの装着期間より少し短めにする事で、予期せぬ剥がれを防ぎましょう。

また用手成形皮膚保護剤を併用し、汗などの水分の吸収をすることで、装着期間の維持など図ってみるものあります。



用手成形皮膚保護剤は左記のようなドーナツ型のもので、必要な分だけ手でちぎったり、また1枚貼りしたりできます。pH緩衝作用があるので、汗でアルカリ性に傾きがちな皮膚を弱酸性に戻していってくれます。装具メーカー各社から販売されています。

下記は弊社製品の用手成形皮膚保護剤になります。

アダプト セラシール

詳細はこちらから

ダンサック TRE™シール

詳細はこちらから

## 2. 皮膚保護剤の溶け・ふやけ

装具に使用されている皮膚保護剤は、高温多湿が苦手です。

高温下での長時間の持ち歩き、高温になる駐車中の車内やトランクには放置しないようにしましょう。また、装具をチャック式ポリ袋などに入れ保護した上で、保冷バックに保冷剤を入れて持ち歩くこともお勧めです。



おうちの中での保管も、私たちにとっても心地よい15～25度程度の一定の温度に保たれる空間で保管するようにしましょう。

### 3. 災害

ゲリラ豪雨や台風などが多くなってくると心配なのが、災害。

避難する際に装具やストーマケア製品がすぐ持ち出せるようになっていますでしょうか。

装具もさることながら、ストーマ近接部を清拭するものや、はくり剤などは、忘れずに入れておきましょう。

#### 【編集後記】

今号の内容はいかがでしたでしょうか？

暑いですね～～が日々の挨拶になっていますね。日本はもうすでに熱帯地方かしら、と思うほどです。どうか皆様も熱中症に気をつけてくださいね。

まごころは、皆様の心のつながりをお手伝いする存在でありたいと思っています。ぜひこれからも、皆様の聞きたい、知りたいことや、こんな工夫をしています、などなど、お声をお寄せください。

皆様とつくるメルマガでありたいと願っています。

では、また、次号でお会いしましょう！

---

※尚、本メールと行き違いで配信停止、退会手続きをされた場合は何卒ご容赦ください。

※記載された内容は予告なく変更することがあります。

※このメールに掲載された記事を許可なく複製、転載することを禁じております。

※弊社が発行する出版物の内容や、取材、記事などについては細心の注意を払って制作

してはおりますが、各媒体、および本サイトで提供する情報、リンク先の情報など  
に關しましては、その完全性、正確性、安全性等についていかなる保証も行ないま  
せん。

また、その内容により生じたいかなる損害賠償や被害についても、一切責任を負う  
ものではありません。

※メールマガジンの配信停止をご希望の場合は、

配信停止希望と書いて、ご住所・お名前・電話番号と配信停止理由をご記載の上  
[Start@hollister.co.jp](mailto:Start@hollister.co.jp) にメールをください。

---

Copyright(C) まごころ事務局 All Rights Reserved.

[発行・編集] 株式会社ホリスター

住所: 東京都品川区東品川 2-2-8 スフィアタワー天王洲 21 階