

令和3年8月吉日

お得意様各位

東京都品川区東品川2-2-8  
スフィアタワー天王洲21階  
株式会社ホリスター  
ダンサック マーケティング  
TEL 0120-977138

## 「ダンサック バリアエクステンダー」発売のご案内

謹啓 時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。平素は弊社製品に格別のご高配を賜り、誠に有難うございます。

この度 面板外周部の「うき」や「はがれ」を防ぐシール「ダンサック バリアエクステンダー」(075-30)を発売することになりました。

本製品は、柔軟性があり皮膚の動きにしっかり追従するハイドロコロイド素材を使用することで、面板とお肌の密着性を高めます。また、必要な部分にのみ使用できるコンパクトなサイズとなっております。

製品に関するお問い合わせは、弊社営業担当者もしくはカスタマー・サービス (TEL : 0120 -032 -950) にて承ります。

ダンサックでは、今後とも皆様にご満足いただけますよう努力して参ります。より一層のご高配を賜ります様、よろしくお願い申し上げます。

謹白

### 記

- 受注開始予定日: 2021年9月10日(金)
- 製品名: ダンサック バリアエクステンダー
- 製品番号: 075-30
- JANコード: 05709817600179
- 規格: 長さ 12.8 cm × 幅 4.0 cm
- 包装単位: 30枚/ケース
- 価格: 2,805円(税抜 2,550円)
- 製品特長:

- ① 気になる部分に「ピンポイントに貼れる」
- ② 使いやすい「コンパクト」なサイズ
- ③ むだなく使えて「リーズナブル」

製品イメージ



包装形態



使用イメージ



以上

## 【ご案内】

製品認知の向上を目的に、ダンサック製品箱にバリアエクステンダーの案内資材を封入いたします。ダンサック装具をお使いの患者様への当製品の認知度が上がることで、代理店の皆様への問い合わせがあると思われませんが、ご支援の程、何卒宜しくお願い申し上げます。

案内資材の封入対象製品	2PCストーマ袋、アクセサリを除く全ダンサック製品箱
封入期間	9/10(金)～12/28(火) *本年度出荷分
封入する案内資材	A6サイズ 二つ折り資材 (下記を参照)

- 必要な枚数を同じ方法で貼付してください。
- 面板交換時に一緒に交換してください。
- 剥がす際は、近くの皮膚をおさえながら、ゆっくり丁寧にはがしてください。
- お肌に異常を感じた際には使用を中止して、すみやかに医療機関を受診してください。

**ダンサック バリアエクステンダー**

製品番号 075-30  
 規格 長さ12.8cm × 幅4.0cm  
 価格 2,805円(税込) (税別2,550円)  
**1枚85円(税別) 30枚/ケース**

使用上・保管上の注意

- 皮膚に合わない場合は使用を中止してください
- 直射日光の当たらない涼しい場所に保管してください
- 幼児の手の届かないところに保管してください
- 使い捨てタイプの製品の再利用は粘着力の低下などのリスクがあります

お問い合わせ先

株式会社オースター・ダンサック  
 〒140-0002 東京都品川区東品川2-28-8 スター・タワー・天竺第2棟  
 FAX: 03-3730-2828 e-mail info@dansac.jp  
 URL: www.dansac.jp  
 ☎ 0120-977138



もっと快適に  
もっと安心に

■ 面板外用専用シール

**ダンサック バリアエクステンダー**

面板の外周部の「うき」や「はがれ」が  
気になる部分に使用することで、  
安心して快適な毎日をサポートします。



屋外活動で



入浴で



旅行で

dansac

■ 面板外用専用シール ダンサック バリアエクステンダー

面板外周部の密着をサポートし  
さまざまなシーンで  
快適と安心を。



屋外での作業や  
運動時にもはがれが  
気にならない！



お湯の入りこみや  
はがれを気にせず  
入浴を楽しめる！



はがれによる  
濡れの心配が薄れ  
よりアクティブに！

気になる部分に「ピンポイント」に貼れる

面板の剥がれが  
心配な個所にピン  
ポイントで貼る  
ことができます。





使いやすい「コンパクト」なサイズ

貼る時にヨレたり、ぬじれ  
たりしにくい、扱いやすい  
コンパクトなサイズです。



12.8cm × 4cm

ムダなく使えて「リーズナブル」

**1枚85円** 必要な部分にだけ1枚ずつ貼れるから、使い方にムダがなく経済的にお使いいただけます。

柔軟性があり動きにしっかり追従するハイドロコロイド素材を使用。面板とお肌の密着度を高めます。

使用方法

1 しっかりと密着させるために、きれいに清拭し、よく乾かします。その後、面板を貼付します。

3 片方のシールの裏紙をはがします。

2 両端をもって軽く引っ張ります。(シールの裏紙が少し浮き上がります。)

4 面板の外周に沿わずようように貼り付け、次に残りのシールの裏紙をはがし、貼り付けます。