

製品には、1箱につき専用ハンガーが1本ついております。使用方法は以下をご参照ください。

キャップのシリーズ専用 排液バッグ付属ハンガー

排液バッグ
付属ハンガー

CEマークが
あるほうが手前です



ベッドなど用フック

チューブホルダー

バッグ用フック



▲
使用方法はこちらから

1 排液バッグの
キャップを閉じる



2 排液バッグに
フック用の穴を開ける



円の中央を
先のとがったもの(ペンなど)で
押すとすぐに穴が開きます

3 排液バッグのチューブを
ハンガーに固定



4 排液バッグの穴に
ハンガーフックを通す



※ハンガーを後ろへ折り曲げてから、排液バッグの穴に通します。片方完了したら同じように反対側にもフックを通し完成です。

5 ベッドなどに
吊り下げる



排液バッグが
床につかないように
吊り下げてください