


ホリスター キャップの シリーズ 一般的な蓄尿袋への接続方法

排出口の口径が大きいため専用コネクタの使用が必要です

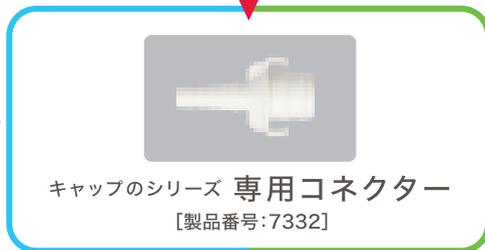

蓄尿袋 + コネクター



蓄尿袋のチューブをカット



コネクターの先が細い方を差し込む
(最後に軽く引っ張り、外れないか確認する)

ストーマ袋 + コネクター ひねるだけのロック式接続だから簡単・安心



キャップをキャップホルダーにはめる
※キャップホルダーにはめなくてもコネクターの使用は可能です



排出口先端の突起の位置を確認する



突起と突起の間の溝にロック部分がかみ合うようにコネクターを差し込む



時計回りにひねりロックする
(最後に軽く引っ張り、外れないか確認する)