



# マウスガード フィッター

接着力低下の原因となる汚れを清掃しラミネートマウスガードの1層目と2層目の接着を強固にします



包装単位 50ml 標準価格 ¥3,500(税抜き)

●1層目のマウスガードの表面に手の油脂やグローブ痕などの汚れが付着していると、2層目シートとの接着を阻害し、剥がれ易くなります。

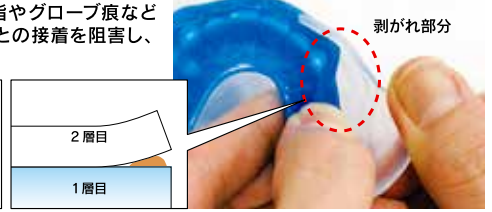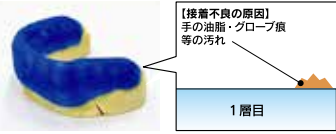

マウスガード1層目の表面 拡大写真 (倍率:1000倍)



接着を阻害する手の油脂がマウスガード表面に付着している。

マウスガードフィッターは、接着不良の原因となる、油脂などの表面汚れを、強力な清掃力で除去!熱によるマウスガード材(EVA)同士の本来の接着力を引き出します。



マウスガードフィッターで清掃したことにより、表面に付着していた油脂が除去された。

使用手順

STEP1



①1層目のマウスガードを用意。ティッシュペーパーの先端に、マウスガードフィッターを5・6滴たらし染みこませます。

STEP2



②マウスガードフィッターを染みこませたティッシュペーパーで軽く押しつけるように、1層目マウスガードの表面全体を拭きます。  
(1層目のマウスガードの表面が清掃され、手の油脂・グローブ痕などの汚れを除去します。)

STEP3



③成型器を用い、2層目のラミネート作業を行って下さい。

STEP4



④十分な冷却時間を置いた後、通常に従って研磨、咬合調整を行って下さい。

## 関連商品

■マウスガードシリーズ(アクリルレジンとの接着性:不可)サイズ127mm×127mm

※記載価格には消費税は含まれておりません。

### 3Dマウスガード




厚さ	4mm
カラー	6種類
包装単位	1枚
標準価格	¥1,700

### マウスガードカラーミックス



厚さ	3.8mm
カラー	27種類
包装単位	1枚
標準価格	¥1,500

### マウスガードカラー

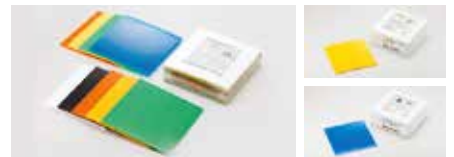

厚さ	3.8mm
カラー	9種類
包装単位	同色 12枚入 標準価格 ¥2,900
	アソート9枚入 標準価格 ¥2,300

### マウスガード(半透明)



厚さ(mm)	枚数	標準価格
1.0	12	¥2,000
1.5	12	¥2,300
2.0	24	¥4,500
3.0	24	¥4,700
3.8	12	¥2,500

### マウスガード ハード



厚さ	2.3mm
包装単位	5枚
標準価格	¥1,600



## マウスガードフィニッシャー

### マウスガード艶出し材



#### 【用途】

マウスガードの艶出し。

#### 【使用方法】

マウスガードフィニッシャーを綿棒などを用いて、マウスガードに塗布して下さい。

※軸が紙製の綿棒をご使用下さい。

(カラー綿棒、軸部がプラスチック製の綿棒は、色移り、溶解の恐れがあります。)

※使用後は、食品添加物として認められている成分に由来するオレンジの香りがしばらく残ります。

(保存環境によりますが、通常、室内で放置し、1週間から10日ほどで消えます。)

包装単位	30mℓ	標準価格	¥2,200
	100mℓ	標準価格	¥5,800

## マウスガードホイール

### マウスガード用 仕上げ研磨ホイール



#### 【用途】

マウスガードの仕上げ研磨。  
マウスガードフィニッシャー(マウスガードの艶出し材)の前処理にご使用下さい。


最大回転数	6,000rpm		
包装単位	6本入/箱	標準価格	¥2,000

## ウレタンビッグ

### 歯科用ゴム製研磨材 ウレタン系ビッグポイント

23B1X10001C09008

一般医療機器

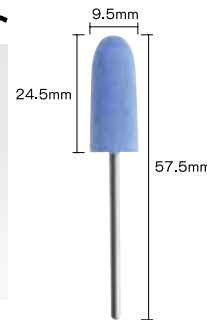

#### 【特徴】

- 気泡によるクッション性によりこちよい研磨感が得られます。
- スポンジ状の気泡により、研磨時の発熱を抑えます。
- マウスガード・軟性裏装材等の形態修正に威力を発揮します。
- レジンにもメタルにも適度な喰いつきがあるため、研磨時間の短縮ができます。

回転数	15,000rpm以下		
包装単位	10本入/箱	標準価格	¥3,600

## マウスガード シザーズ

### マウスガードの細かな部分も狙い通りカット!!



#### 【用途】

マウスガード成型時のジスクのカット

包装単位	1本	標準価格	¥6,500
------	----	------	--------

## バキュームアダプターI型

### 歯科技工用成型器 真空成型器

23B1X10001A69005

一般医療機器



### スプリント、マウスガードが簡単に、精密に出来上がります。

ヒータースイッチをON、ジスクを加熱、軟化して、たれ下がったら、真空スイッチをON。これで出来上がりです。

#### 【仕様】

- 真空ポンプ内蔵
- 取付工事一切不要
- 重量:6.5kg
- 寸法:230×210×366(mm)
- 使用電源:AC100-110V(50/60 Hz)
- 消費電力:1270W

標準価格 ¥79,000

※記載価格には消費税は含まれておりません。 ※価格は予告なく変更する場合があります。

山八歯材最新情報はホームページで... ~健康は歯から~(お問い合わせ・ご質問等もお待ちしております) [www.yamahachi-dental.co.jp/](http://www.yamahachi-dental.co.jp/)

4657

●ご用命は...



製造販売元

山八歯材工業株式会社

〒443-0105 愛知県蒲郡市西浦町大知柄54-1

TEL(0533)57-7121 FAX(0533)57-1764

Home Page <http://www.yamahachi-dental.co.jp/>

E-mail [box@yamahachi-dental.co.jp](mailto:box@yamahachi-dental.co.jp)