


# ヘルスアシスト HA-4EX 交換用ヘルスマーター取扱説明書

ヘルスアシスト HA-4EX をご愛用頂き誠にありがとうございます。

ヘルスアシスト HA-4EX に搭載しておりました「オムロン HBF-370」が製造終了となりました。製造終了に伴い、新たな交換用ヘルスマーター「オーム HBC-1505」の取り付け手順書となります。

注意)手袋(軍手)・保護メガネ等を使用し安全に作業して下さい。

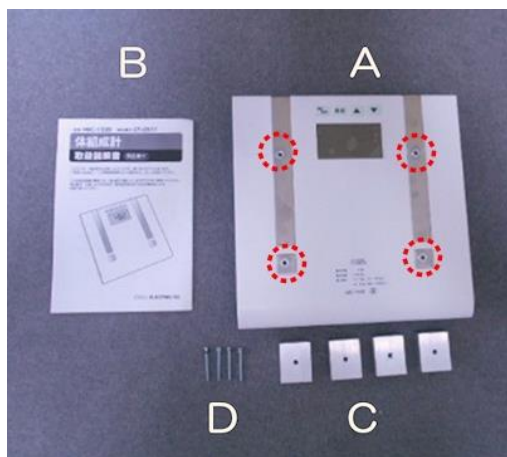


## 【梱包内容】

- A. オーム HBC-1505(ヘルスマーター本体): 1 台
- B. オーム HBC-1505 取扱説明書: 1 部
- C. スペーサー: 4 個
- D. 取り付け用ネジ: 4 セット

ナベネジ: 4 個  
スプリングワッシャー: 4 個  
丸座金: 4 個

※ヘルスマーターは細心の注意をもって2次加工をしておりますが、多少のキズや汚れはご容赦下さい。


## 【取り付け方法】

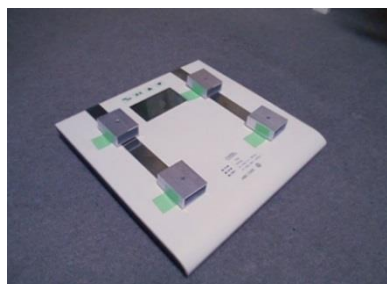

※ご用意いただく物

仮止め用テープ(セロハンテープ等)、プラスドライバー

ヘルスマーターのネジ穴(A○印)にスペーサーの穴を合わせて、テープで仮止めをして下さい。

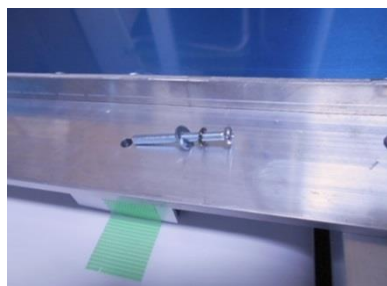

ヘルスアシストのフレームを載せて、ナベネジにスプリングワッシャー、丸座金の順に入っているのを確認して下さい。

ヘルスマーター最上部のネジ穴 → スペーサー → ヘルスマーター穴の全てに時計回りに回して貫通するように入れて下さい。



4穴の全てにネジを入れたら、プラスドライバーで時計回りにしっかりと締め込んで下さい。

仮止めテープをはがしたら取り付け完了です。

販売元: グループアシスト 〒213-0015 神奈川県川崎市高津区梶ヶ谷 3-10-15

TEL: 044-857-0776/080-5033-9111