

「ウイルス検査キット」ご使用方法

「ウイルス検査キット」は、医療機関と同じ内容の検査をご自宅にしながら気軽に受けることのできる検査キットです。検査に年齢制限はございませんが、スポンジを口に含み唾液を採取しますので、誤飲の可能性がある小さなお子様は保護者が必ず口腔内を抑えて採取するか小児用の直接唾液を採取するタイプをご使用ください。保護者の管理のもと検査いただくようお願い申し上げます。食後またはうがい後の場合、30分時間を置いてから検査を行ってください。

利用者は説明書に従って、各自で自宅にて検査試料を自己採取後、防漏性容器に収めます。容器をジップ袋に入れ密封後、封筒に入れ封をし、郵便ポストに投函してください。回収後、結果通知までにかかる日数は最速即日約3日以内（日祝除く）となります。バーコードのNo.をお控えいただくと、メールアドレスが無くても検査結果を確認いただくことができます。

■ 検査の流れ



1 まず、同梱物チェックシートを見ながら、同梱物に不備がないか確認をしてください。採取した唾液は24時間以内に送れるように準備してください。



2 手を洗い清潔な環境で検査を行います。食後またはうがい後は30分時間を置いてから検査をしてください。



3 採取容器中のキャップを開き、中からスポンジを取り出します。この時、採取容器中は捨てないでください。



4 スポンジを口に含み、唾液を染み込ませます。(約2分) スポンジを歯と頬の内側に入ると唾液を採取しやすいです。スポンジは噛まないよう注意してください。



5 十分に唾液を含ませたら口からスポンジを取り出し、採取容器中の中にスポンジを戻します。カチッと音がするまでしっかりとフタを閉めます。



6 採取容器中をバーコードのついた採取容器外に入れます。カチッと音がするまでしっかりと閉めます。



7 パラフィルムをシートから剥がします。採取容器外のフタ部分を密閉するためにパラフィルムを巻いていきます。



8 パラフィルムを引っ張り、伸ばしながらぐるぐると巻いていきます。パラフィルムは予備分も同梱していますが、失敗した場合はサララップで代用してください。



9 給水シートに採取容器をくるみ、輪ゴムで止めます。給水シートは柔らかい面を内側にします。これをさらにジップ袋へ入れ密封します。



10 封筒にジップ袋を入れ、同意書に必要な事項を記入したものと一緒に入れます。封筒が開かないようにしっかり封をします。



11 封筒をお近くのポストへ投函してください。お客様のご負担はありません。



12 検査所に到着後3日以内にメールで結果をお送りいたします。

【販売元】

 株式会社
Hiro Japan

〒112-0001 東京都文京区白山2-2-11 岡本ビル101


 0120-915-967
covid@hiro-japan.jp

同梱物・検査内容チェックシート

こちらは「ウイルス検査キット」の同梱物、採取方法の確認用チェックシートになります。ご自身で採取をされる際にお使いください。尚、このシートは検査キットと一緒に郵送いただく必要はございません。検査氏名とバーコードNo.をお控えいただくと、結果メールが届かない等のトラブルの際にも検査結果をご確認いただくことができますのでメモをお取りいただくことをおすすめいたします。万が一同梱物に不備等がございましたら、0120-33-4747 までお問い合わせください。

■ 同梱物チェック

同梱物は全て揃っていますか？

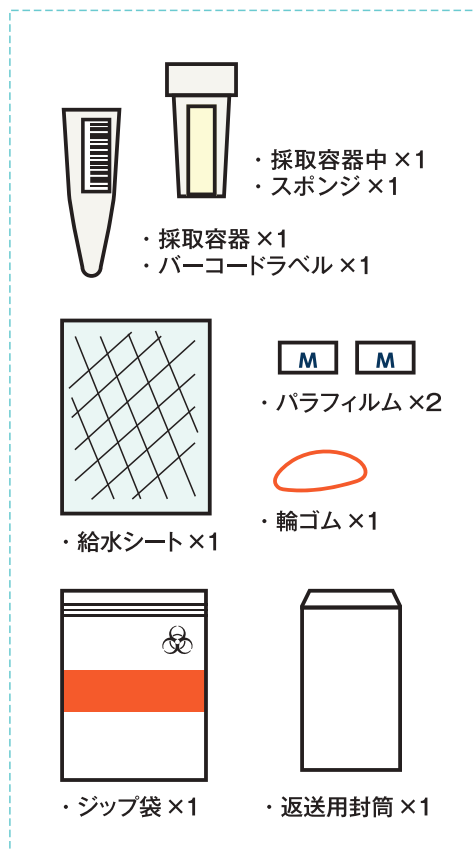

同梱物	個数	チェック欄
採取容器外 (バーコード付)	×1	
採取容器中 (スポンジ入)	×1	
給水シート	×1	
パラフィルム	×2	
ジップ袋	×1	
輪ゴム	×1	
返送用封筒	×1	

検査氏名	バーコードNo.

■ 検査内容チェック

検査内容は問題なく進められましたか？

検査内容確認	チェック欄
手を洗いましたか？	
食後、うがい後から 30分経っていますか？	
スポンジを 2分間、唾液に浸しましたか？	
容器の蓋をしっかり締め、パラフィルムを巻きましたか？	
給水シートで採取容器をくるみましたか？	
ジップ袋のジップはきちんと閉じましたか？	
記入した同意書は同梱しましたか？	