

「新型コロナウイルスPCR検査キット」ご使用方法

今回、提供する「新型コロナウイルス PCR 検査キット」は、厚生労働省が新型コロナウイルス感染症について相談・受診すべき目安として挙げている特定の症状は出ていないものの、不安を感じられる方や海外渡航を目的とした方を対象としています。なお、厚生労働省が新型コロナウイルス感染症に関する相談・受診の目安として挙げている症状の出ている方は本検査キットをご使用いただけません。

検査に年齢制限はございませんが、スポンジを口に含み唾液を採取しますので、誤飲の可能性がある小さなお子様は保護者が必ず口腔内を抑えて採取するなど、保護者の管理のもと検査いただくようお願い申し上げます。

食後またはうがい後の場合、30分時間を置いてから検査を行ってください。

利用者は説明書に従って、各自で自宅にて検査試料を自己採取後、防漏性容器に収めます。容器をジップ袋に入れ密封後、封筒に入れ封をし、郵便ポストに投函してください。回収後、結果通知までにかかる日数は最短即日から約3日以内（土日祝除く）となります。

【検査の流れ】



まず、同梱物チェックシートを見ながら、同梱物に不備がないか確認をしてください。採取した唾液は24時間以内に送れるように準備してください。

手を洗い清潔な環境で検査を行います。食後またはうがい後は30分時間を置いてから検査をしてください。

メモリのついたコネクションチューブに水色のファネルを取り付けます。

口の中に唾液を溜めてから、容器の中に直接唾液を流し込んでいきます。



唾液を「2」の目盛りまで入れたら、コネクションチューブを縦に持ち、水色のファネル部分を取り外します。水色のファネルはご自宅で廃棄いただくかまいません。

コネクションチューブのキャップをしっかり締めてください。

パラフィルムをシートから剥がします。コネクションチューブのフタ部分を密閉するためにパラフィルムを巻いていきます。

パラフィルムを引っ張り、伸ばしながらぐるぐると巻いていきます。パラフィルムは予備分も同梱していますが、失敗した場合はサララップで代用してください。



給水シートに採取容器をくるみ、輪ゴムで止めます。給水シートは柔らかい面を内側にします。これをさらにジップ袋へ入れ密閉します。

封筒にジップ袋を入れ、同意書に必要事項を記入したものと一緒に入れます。封筒が開かないようにしっかり封をします。

封筒をお近くのポストへ投函してください。お客様のご負担はありません。

検査所に到着後3日以内にメールで結果をお送りいたします。

【販売元】

同梱物・検査内容チェックシート

こちらは「新型コロナウイルス PCR 検査キット」の同梱物、採取方法の確認用チェックシートになります。ご自身で採取をされる際にお使いください。尚、このシートは検査キットと一緒に郵送いただく必要はありません。万が一同梱物に不備等がございましたら、0120-33-4747 までお問い合わせください。


■ 同梱物チェック

同梱物は全て揃っていますか？



・ファネル ×1


- ・採取容器 ×1
- ・赤キャップ ×1
- ・バーコードラベル ×1

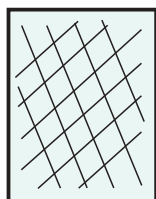

・給水シート ×1




・パラフィルム ×2

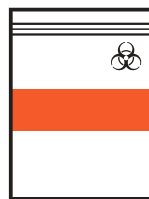

・ジップ袋 ×1



・輪ゴム ×1

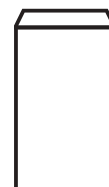

・返送用封筒 ×1

同梱物	個数	チェック欄
採取容器（バーコード、赤キャップ付）	×1	
ファネル（水色）	×1	
給水シート	×1	
パラフィルム	×2	
ジップ袋	×1	
輪ゴム	×1	
返送用封筒	×1	

■ 検査内容チェック

検査内容は問題なく進められましたか？

検査内容確認	チェック欄
手を洗いましたか？	
食後、うがい後から 30 分経っていますか？	
スポンジを 2 分間、唾液に浸しましたか？	
容器の蓋をしっかり締め、パラフィルムを巻きましたか？	
給水シートで採取容器をくるみましたか？	
ジップ袋のジップはきちんと閉じましたか？	
記入した同意書も同梱しましたか？	