

【該当する対象製品】


KM-8000A おでかけヘッドガードライト
バケットハットタイプ

この度は、「おでかけヘッドガード®」シリーズをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に、本説明書を必ず十分にお読みいただき、正しくご使用ください。また、本説明書は正しいご使用ができます様、お読みになられた後も大切に保管してください。



内蔵された衝撃吸収パッド

頭囲部
衝撃吸収パッド

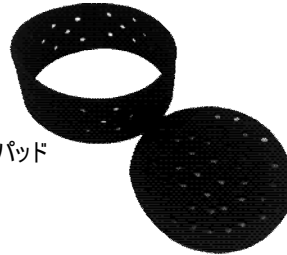

頭頂部衝撃吸収パッド

【ご使用方法】

- ・ご使用の際は頭囲部と頭頂部に衝撃吸収パッドが取り付けられていることを確認してください。
- ・帽子を着用し、あごひものドロコードを任意の位置まで引き上げ固定します。(指や首にあごひものが絡まない様、ご注意ください)

【ご使用上の注意】



必ずお読みください



※以下の表示を無視して誤った取扱いをすると人身もしくは財産が傷害、損害を負う可能性が想定されます。

- ・本製品は頭部に対する衝撃を緩和するもので、完全保護を保証するものではありません。局所的な高衝撃や保護部の隙間等に衝撃が加わった場合を含め、打突時にケガをする場合がございます。
- ・ご使用になられる方に転倒の恐れがある場合は、必ず保護者・管理者が付き添ってください。
- ・「おでかけヘッドガード」をご使用の際、確実に頭部にフィットしている事を確認してください。サイズが大きすぎたり、かぶりかたが不十分ですと事故の原因となります。また、サイズが合わない場合、脱げやすかったり、締め付けがきつく感じられたりするなどの不具合が発生します。確実に頭部にフィットするサイズをお選びください。
- ・「おでかけヘッドガード」に無断で改造を施すことはいかなる理由があっても厳禁です。製品の機能低下をまねく原因となり危険です。

【お手入れ方法】

- ・洗濯の際は衝撃吸収パッドを取り外してください。(下図参照)
- ・洗濯／乾燥の際、洗濯機、乾燥機を使用しないでください。汚れた場合は、中性洗剤を水に溶かし、手洗い(押し洗い)後、陰干ししてください。特に乾燥機をご使用されますと生地の色落ちや縫製のほつれ、傷みが発生したり、熱により衝撃吸収パッドが溶解・変形・変質する原因となりますのでおやめください。
- ・漂白剤や有機溶剤(ベンジン・シンナー等)を使用しないでください。

切れ込みから衝撃吸収パッドを抜き出す ※頭頂部用・頭囲用の二つがあります

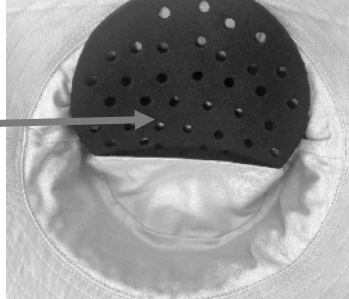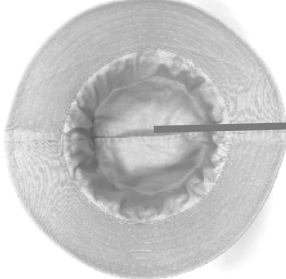

※見やすくするためあごひものを外しています

あごひものは取り外す事ができます



※写真は全てイメージで仕様が異なる場合があります

【製品仕様】

- ・材質: 帽体/綿100% (UVカット仕様) ・衝撃吸収パッド: EVA
- ・重量(目安): 約110g
- ・サイズ(衝撃吸収パッド装着時): M(55~57cm)、L(58~60cm)
※重量・サイズは個体差により若干の誤差がございます
- ・カラー: オフホワイト、ラベンダー
- ・生産国 商品の品質クロス部分に記載

※製品の都合上、予告なく仕様が変更される場合がございます。予めご了承ください。

※商品を廃棄される場合には各自自治体の区分に従って処理してください。

＜製品に関するお問い合わせ＞

〒108-0023 東京都港区芝浦4丁目3番4号田町きよたビル 3F
キヨタ株式会社 営業本部 福祉用具開発グループ
TEL 03-3798-3617 FAX 03-3798-3618

こちらをQRコードをアクセス頂くと
頭部保護帽の購入が可能です。

