

この度は、「おでかけヘッドガード® TNセパレートタイプ」シリーズをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
 ご使用の前に、本説明書を必ず十分にお読みいただき、正しくご使用ください。  
 また、本説明書は正しいご使用ができます様、お読みになられた後も大切に保管してください。

### 【本説明書に該当する対象製品】

KM-7000A



KM-7000B



KM-4000V  
(インナー)



### 【ご使用方法】

・帽子と専用のインナーをホックで取り付けて使用します。内側にタグが付いている方が帽子の後頭部側(後ろ)です。インナーに前後はございませんので、お好みの方向で帽子にホック止めしてください。インナーのあごひもは取りはずす事もできます。



※見やすくするためあごひもを外しています

### 【ご使用上の注意】

必ずお読みください



※以下の表示を無視して誤った取扱いをすると人もしくは財産が傷害、損害を負う可能性が想定されます。

- ・本製品は頭部に対する衝撃を緩和するもので、完全保護を保証するものではありません。局所的な高衝撃や保護部の隙間等に衝撃が加わった場合を含め、打突時にケガをする場合がございます。
- ・ご使用になられる方に転倒の恐れがある場合は、必ず保護者・管理者が付き添ってください。
- ・「おでかけヘッドガード」をご使用の際、確実に頭部にフィットしている事を確認してください。サイズが大きすぎたり、かぶりかたが不十分ですと事故の原因となります。また、サイズが合わない場合、脱げやすかったり、締め付けがきつく感じられたりするなどの不具合が発生します。確実に頭部にフィットするサイズをお選びください。
- ・「おでかけヘッドガード」に無断で改造を施すことはいかなる理由があっても厳禁です。製品の機能低下をまねく原因となり危険です。

### 【お手入れ方法】

- ・洗濯／乾燥の際、洗濯機、乾燥機を使用しないでください。汚れた場合は、中性洗剤を水に溶かし、手洗い(押し洗い)後、陰干ししてください。(インナーはあごひもを外してから行ってください)特に乾燥機をご使用されますと生地の色落ちや縫製のほつれ、傷みが発生したり、熱により衝撃吸収パッドが溶解・変形・変質する原因となりますのでおやめください。
- ・漂白剤や有機溶剤(ベンジン・シンナー等)を使用しないでください。
- ・メッシュ素材は生地の痛み防止のため、強くこすったり、もみ洗いをしないでください。

### 【製品仕様】

- ・材質 KM-7000A: ポリエステル100%、KM-7000B: 表ポリエステル100%/裏ポリエチレンフィルム、インナー/ポリエステル100%
- ・衝撃吸収パッド スチレン系エラストマー
- ・重量(目安) KM-7000A/約170g KM-7000B/約180g インナー/約90g
- ・サイズ(帽子にインナーを取り付けた際の目安) KM-7000A KM-7000B インナー共通: M(55~57cm)、L(58~60cm)  
 ※重量・サイズは個体差により若干の誤差がございます
- ・生産国 商品の品質クロス部分に記載

### ＜製品に関するお問い合わせ＞

〒108-0023 東京都港区芝浦4丁目3番4号田町きよたビル 3F  
 キヨタ株式会社 営業本部 福祉用具開発グループ  
 TEL 03-3798-3617 FAX 03-3798-3618

こちらをQRコードをアクセス頂くと  
 頭部保護帽の購入が可能です。

