


# KM-1000X 防災ヘッドガード

## 取扱説明書



【本説明書に該当する製品】  
-KM-1000X (防災ヘッドガード)

この度は、「防災ヘッドガード」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
ご使用の前に、本体表示及び本説明書を必ず十分にお読みいただき、正しくご使用ください。  
また、本説明書は正しいご使用ができます様、お読みになられた後も大切に保管してください。

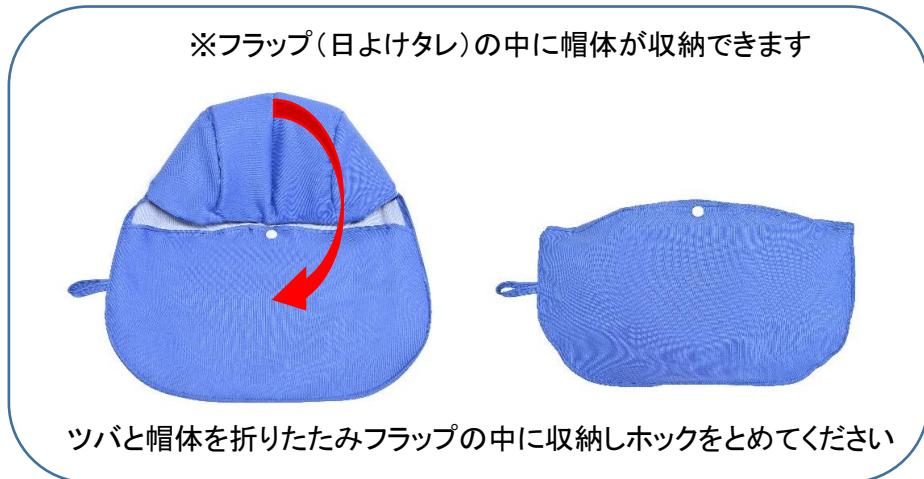

### 【ご使用方法】

- 帽子を着用し、あごひものドローコードを任意の位置まで引き上げ固定します。(指や首にあごひもが絡まない様、ご注意ください)

### 【ご使用上の注意】

必ずお読みください



- ※以下の表示を無視して誤った取扱いをすると人もしくは財産が傷害、損害を負う可能性が想定されます。
- 本製品は頭部に対する衝撃を緩和する用途以外にはお使いにならないでください。
  - 本製品は頭部に対する衝撃を緩和するもので、完全保護を保証するものではありません。局所的な高衝撃や保護部の隙間等に衝撃が加わった場合を含め、打突時にケガをする場合がございますのでご使用にあたっては十分にご注意ください。
  - 使用前に製品に異常がないことを確認のうえ着用してください。また、異常が確認された場合は直ちに使用を中止し、下記問い合わせ先にすみやかに連絡し指示を仰いでください。
  - ご使用になられる方に転倒の恐れがある場合は、必ず保護者・管理者が付き添ってください。
  - 小学生以下の子様がご使用になる場合は、保護者・管理者が適切な使用方法を守るよう指導してください。
  - 本製品をご使用の際、確実に頭部にフィットしている事を確認してください。サイズが大きすぎたり、かぶりかたが不十分ですと事故の原因となります。また、サイズが合わない場合、脱げやすかったり、締め付けがきつく感じられたりするなどの不具合が発生します。確実に頭部にフィットするサイズをお選びください。
  - 本製品を無断で加工・改造を施すことはいかなる理由があっても厳禁です。製品の機能低下をまねく原因となり危険です。
  - 本製品の品質表示は、故意に剥がしたり切り取ったり隠したりしないようお願ひいたします。

### 【お手入れ方法】

- 洗濯／乾燥の際、洗濯機、乾燥機を使用しないでください。汚れた場合は、中性洗剤を水に溶かし、手洗い(押し洗い)後、陰干してください。特に乾燥機をご使用されますと生地の色落ちや縫製のほつれ、傷みが発生したり、熱により衝撃吸収パッドが溶解・変形・変質する原因となりますのでおやめください。
- 漂白剤や有機溶剤(ベンジン・シンナー等)を使用しないでください。

### 【製品仕様】

- 本体：表地 ポリエステル100% (防炎加工) ・ 衝撃吸収材 スチレン系エラストマー
- サイズ：52-54cm ・ 58-60cm (個体により若干の誤差がございます)
- 重量：約110g
- カラー：ブルー ・ ピンク
- 生産国：日本



#### 〈製品に関するお問合せ〉

〒108-0023 東京都港区芝浦4丁目3番4号 田町きよたビル3階  
キヨタ株式会社 営業本部 福祉用具開発グループ  
Tel 03-3798-3617 Fax 03-3798-3618  
e-mail : k-kaihatsu@kiyota-and.co.jp



Online shop

※製品の都合上、予告なく仕様が変更される場合がございます。あらかじめご了承ください。