

ご使用上の注意事項／必ずお読みください！



この表示を無視して誤った取り扱いをすると
人が傷害を負う可能性が想定されます。

1. 本製品は頭部保護を必要とされる方の日常生活用具です。それ以外でのご使用は絶対におやめください。また、本製品は頭部に対する全ての衝撃を完全に保護できるものではありません。局所的な高衝撃や本体保護部の隙間等に衝撃が加わった場合、ケガをする恐れがあります。必ず保護者、監督者が付き添い、転倒を未然に防ぐようにしてください。
2. 本製品が頭に確実ににはめられている事をご確認ください。かぶせ方が不十分であったり前後が逆ですと事故の原因となります。
3. あごベルトは確実に止め、本製品がずれないことをご確認してからご使用ください。止め方が不十分ですと事故の原因となります。
4. あごうけを使用する場合は、あごうけにあごベルトを正確に通し、あごベルトを確実に止めてください。あごうけには前後がありますので向きにご注意ください。
5. 成長期等、様々な理由によりサイズが合わない場合がございます。サイズが合っていないまま使用することは事故の原因となります。その際は、サイズを調節するか、販売店へご相談ください。
6. 本製品を切る、縫う等の改造をすることは、機能を低下させ事故の原因となりますので絶対におやめください。
7. 洗濯の際はマジックテープの部分は、必ず閉じた状態で洗ってください。中性洗剤を使用し、手洗い後、形を整えて陰干ししてください。漂白剤や有機溶剤等は製品をいためる原因となりますので絶対に使用しないでください。

※製品の仕様及び価格は、予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。

製品に関するお問い合わせ


キヨタ株式会社 営業本部 福祉用具開発グループ

〒108-0023

東京都港区芝浦4丁目3番4号田町きよたビル

TEL 03-3798-3617 FAX 03-3798-3618

URL <http://www.kiyota-and.co.jp>

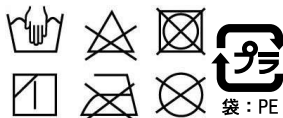

第4版


頭部保護帽 ヘッドガード フィット

取扱説明書（共通）


この度は、頭部保護帽 ヘッドガード フィットをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に本説明書を必ず十分にお読みいただき、正しくご使用ください。また本説明書は、正しいご使用ができます様、お読みになられた後もいつでも取り出せるところに保管してください。

対象製品

・KM-30

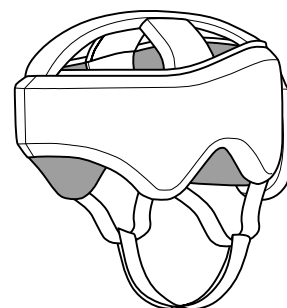

・KM-400

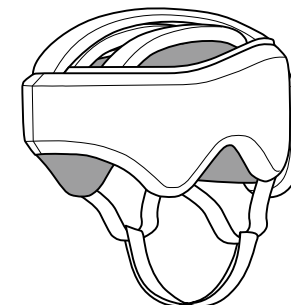

オプション商品（別売）のご案内

※本商品にKM-2・3・4・5・6・7・8は含まれておりません

※頭部パッドとつばパーツを併用する際は頭部パッドから取り付けて下さい

・KM-2/あごうけ

・KM-3/あごうけカバー


・KM-4/ヘッドガード フィット専用 頭部パッド

・KM-5/ヘッドガード フィット専用 頬パッド

・KM-6/ウレタン製あごうけ

・KM-7/ヘッドガード フィット用あごひも

・KM-8/ヘッドガード フィット専用 つばパーツ

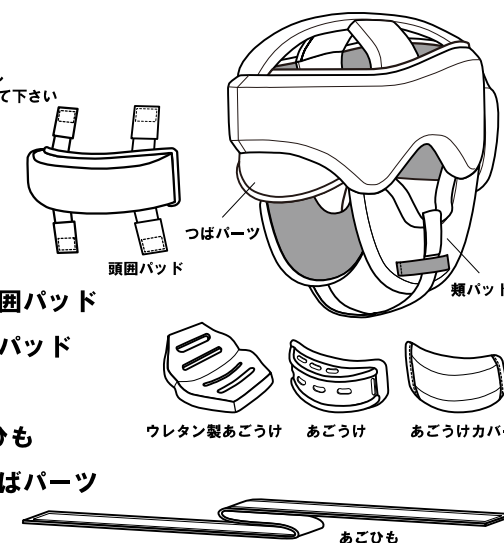


各部の名称と使用方法

本製品をご使用される為の準備


梱包袋から本製品を取り出し、頭頂部・後頭部のマジックテープをはがし、頭頂部についている別パーツをとりはずしておきます。

① 「かぶりの深さ」を調節します

【KM-30】

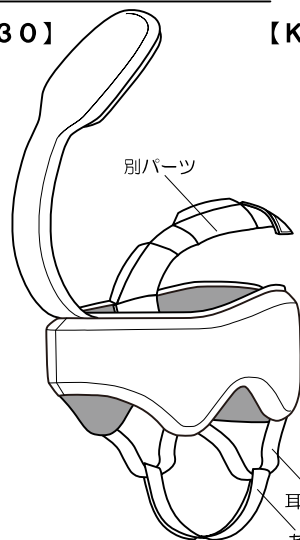


【KM-400】

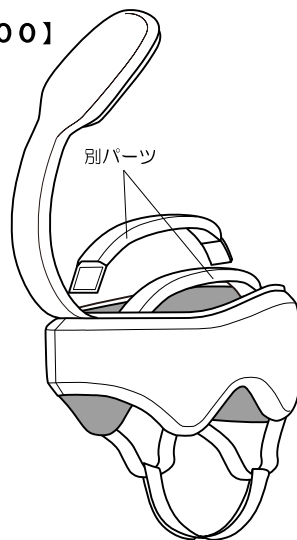


それぞれについている頭頂部の別パーツを任意の位置に取り付けて「かぶりの深さ」を調節します。

② 「頭囲」を調節します

【KM-30】

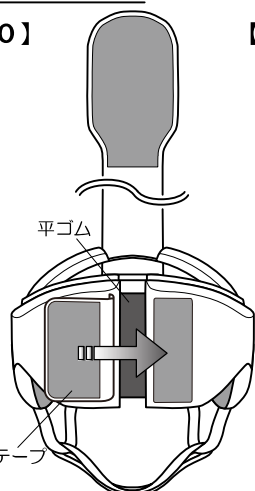


【KM-400】

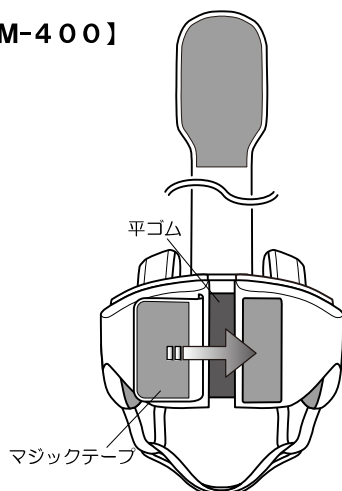


一度、後頭部のマジックテープをはがしてヘッドガードを深くかぶり「頭囲」を決定します。決定後、再びマジックテープを止めて「頭囲」を固定します。装着時は、あごベルト・耳ベルトを引っばらないでください。必ず本体を持って装着してください。

③ 「頭頂部」を固定します

【KM-30】

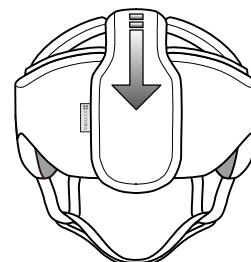




【KM-400】

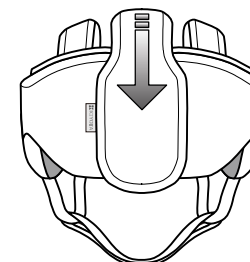

頭頂部の部分を任意の位置で固定し、調節は完了です。
サイズに問題が無ければ着脱の度に上記の作業を行う必要はありません。

④ あごベルトを調節します


【KM-30/KM-400共通】

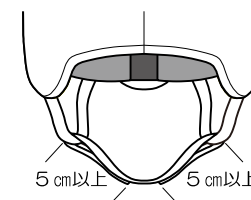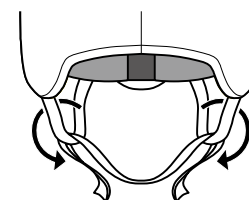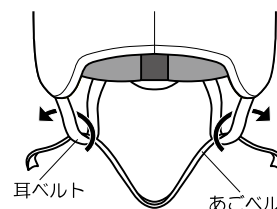


あごベルトの両端を内側から外側に向かって耳ベルトに通してそれぞれ固定します。安全の為折り返し部分は5 cm以上確保してください。
(作業は左右どちらからでも構いません)

※ あごうけ「KM-2・6」、あごうけカバー「KM-3」(各種別売)の取付方法


【KM-30/KM-400共通】

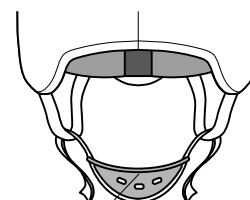

KM-2 をご使用の場合

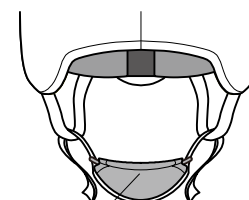

KM-2 と KM-3 をご使用の場合

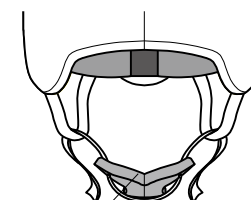

KM-6 をご使用の場合

「あごうけ」両端の通し穴にあごベルトが外側に出るように通して固定します。あごうけカバーをご使用の際は事前にかぶせてから通します。