


頭部保護帽 KM-50 ヘッドガードライト

取扱説明書

この度は、頭部保護帽 ヘッドガードライトをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に本説明書を必ず十分にお読みいただき、正しくご使用ください。また本説明書は、
正しいご使用ができますよう、お読みになられた後もいつでも取り出せる場所に保管してください。

対象製品

・KM-50

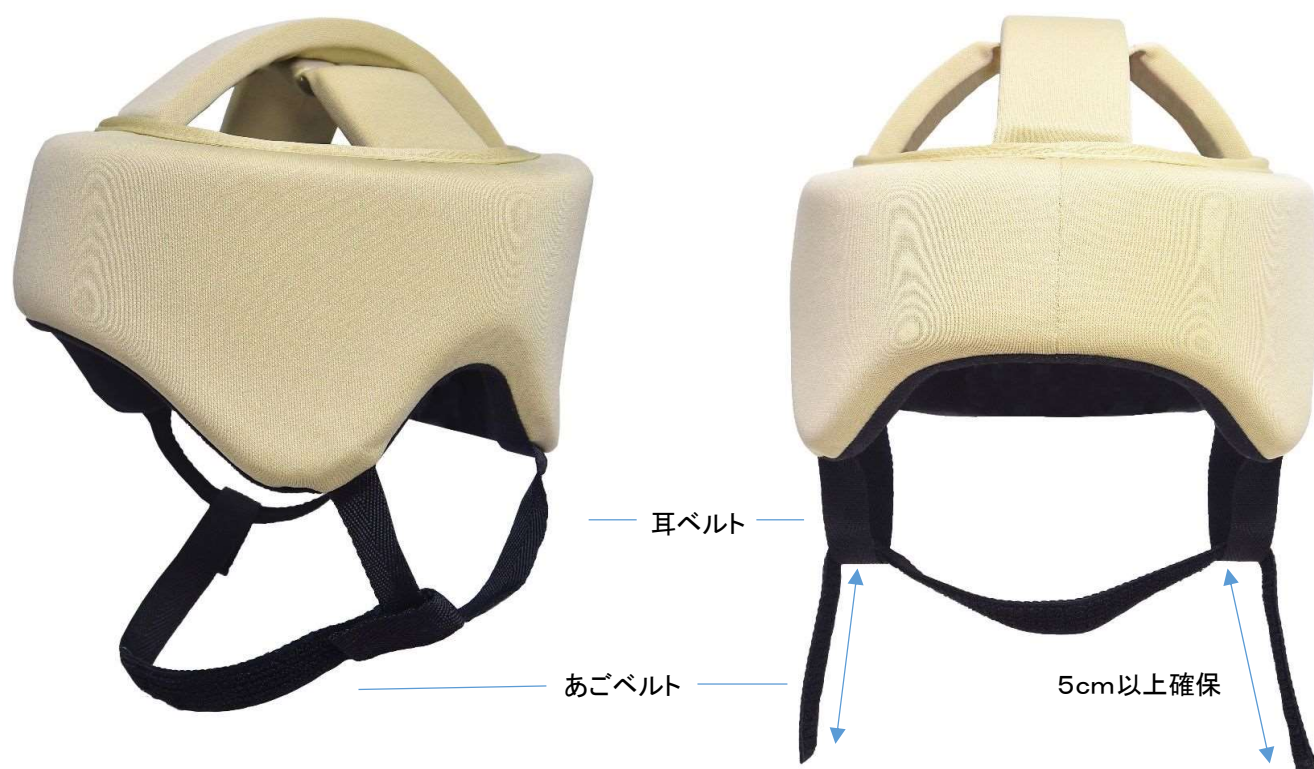

【あごベルト調節】

- ・あごベルトの両端を内側から外側に向かって耳ベルトに通して左右それぞれ面ファスナーで固定します。
- ・安全のため折り返し部分は5cm以上確保してください。



ご使用上の注意事項／必ずお読みください！

この表示を無視して誤った取り扱いをすると人が傷害を負う可能性が想定されます。

- 1 本製品は頭部保護を必要とされる方の日常生活用具です。それ以外でのご使用は絶対におやめください。また、本製品は頭部に対する全ての衝撃を完全に防ぐものではありません。
局所的な高い衝撃や本体保護部の隙間等に衝撃が加わった場合、ケガをする恐れがあります。
必ず保護者、監督者が付き添い事故を未然に防ぐよう注意してください。
- 2 本製品が頭に正しく着用されていることをご確認ください。かぶりが浅かったり、前後が逆ですと十分な保護効果が得られず事故の原因となります。
- 3 あごベルトは確実にとめ、本製品がずれないことを確認してからご使用ください。
とめ方が不十分ですと事故の原因となります。
- 4 あごうけを使用する場合は、あごベルトに正確に通し、あごベルトを確実にとめてください。
- 5 体格の変化等、様々な理由によりサイズが合わなくなる場合がございます。サイズが合わないまま使用し続けると事故の原因となります。その際はご使用を控え販売店にご相談ください。
- 6 本製品を切る、縫う等改造を加えることは、性能を低下させ事故の原因となりますので、絶対におやめください。
- 7 異物が付着する恐れがありますので、洗濯の際は面ファスナーを閉じた状態で洗ってください。
中性洗剤を使用し、手洗いの後、形を整えて陰干ししてください。
漂白剤や有機溶剤等は製品をいためる原因となりますので絶対に使用しないでください。

※製品の仕様及び価格は予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。

【お問い合わせ】

キヨタ株式会社 営業本部 福祉用具開発グループ
〒108-0023
東京都港区芝浦4-3-4 田町きよたビル
TEL 03-3798-3617 FAX 03-3798-3618
<http://www.kiyota-and.co.jp>

