



2021年7月作成（新様式第1版）

医療機器届出番号：27B1X00132000005

医療用品（04）整形用品
一般医療機器 医療用不織布（JMDNコード：34655000）**販売名：メタリン ウォウンド ドレッシング****再使用禁止****【禁忌・禁止】**

<適用対象>

以下を呈する患者には使用しないこと。

- 1) 原材料に対する過敏症

<使用方法>

- 1) 再使用しないこと。[巨視的損傷を認めない際においても、本品の機能損傷や使用時の破損に至る恐れがある。]
- 2) 再滅菌しないこと。[本品は、滅菌包装より取り出した後に、直ちに使用することを意図した製品であるため、繰り返し滅菌に対する安全性は担保されていない。]

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- 1) 包装の破損や製品の以上が認められた場合には使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法：高温、多湿、直射日光を避け、水漏れに注意の上、室内で保管

有効期間：外箱の表示を参照（自己認証による）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

<製造販売業者>

伊藤メデックス株式会社

緊急連絡先：042-274-0711（代表）

<製造業者（設計）>

ローマン アンド ラシアー社（Lohmann & Rauscher GmbH & Co.KG.）、ドイツ

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造

製品名、サイズ、製品番号、ロット番号等については、法定表示ラベルの記載を確認すること。

- 1) Metalline Wound Dressings

		外観写真
原材料	- ビスコース - アルミニウム	
サイズ	枠外を参照	

- 8cm×10cm/10枚入（製品番号：23083）
- 8cm×10cm/50枚入（製品番号：23081）
- 10cm×12cm/10枚入（製品番号：23084）
- 10cm×12cm/50枚入（製品番号：23082）
- 10cm×20cm/25枚入（製品番号：23087）
- 6cm×7cm/50枚入（製品番号：23093）
- 8cm×9cm/50枚入（製品番号：23094）
-

2. 原理

創傷部に貼付することにより創傷部の被覆・保護材となる。

創傷接触面の微孔により血液や滲出液を素早く内部の吸収層に吸収する。

【使用目的又は効果】

傷や術後創傷の被覆及び保護のために用いる。

【使用方法等】

1. 使用方法

- 1) 適切なサイズを選択する。
- 2) 貼付前に創の周囲を清拭する。
- 1) 包装より取り出し、銀色（アルミニウム）面を傷口にあて、粘着テープで固定する。