

Japan Polymer Technology

ラパスタはドライボックスの概念を
根本から変えました

Functions of LapaSta



Shifting the view for new beginnings



トレーニング前の設置や片付けに
10秒もかかりません。
トレーニング後は机の引き出しへ
終わることができます。
また、カバンへ入れて持ち運べます。

トレーニングを始める際に、ラパスタを
使用すれば直ぐにトレーニングを
始めることができます。

セッティングの煩雑さでモチベーション
を下げることはありません。



LapaSta has changed the concept of dry boxes.

価格

2本/セット ポート付き

24,000円

送料・消費税別



LapaSta has changed the concept of dry boxes.

仕 様

製品名	ラパスタ (LapaSta®)
高さ・重さ	210mm・175g/本
吸盤仕様	Φ70mm PVC製 レバー操作
金属ヘッド	360°回転
ニードルホール	ゴム製
アーム	アルミニウム製
ポート	付属 色の変更あり
製品構成	2本セット



LapaSta has changed the concept of dry boxes.

設 置

推奨環境	吸盤が設置できる場所 設置場所に吸盤が使用できない場合、光沢面のアクリル板をお勧めします。推奨サイズは厚さ3mm*縦600mm*横450mmです
ご使用前確認	吸盤レバーが上向きになっていることを確認。吸盤接地面が、埃、油、薬品、離型剤などによって汚れていないか確認
ご使用準備	<ol style="list-style-type: none"> 1. 吸盤上部を指で押付ながら接地面へ付け、吸盤レバーを下げる（画像1, 2, 3） 2. アームノブを解除し、アームを持ちながら鉗子類入口の位置を決める 3. アームを手で支えながらネジを締めて、アームを固定する



1



2



3

LapaSta has changed the concept of dry boxes.

片付け

取り外し

吸盤の上部に指で押付て、片方の手で吸盤レバーを上げる（画像4, 5）
吸盤と接地面の間に爪の先を入れると、接地面から吸盤が浮きます（画像6）
アームノブを緩める
直射日光を浴びず、薬品がかからない場所に保管



4



5



6

LapaSta has changed the concept of dry boxes.

ご注意事項

- 臨床では使用できません
- アームを固定後、強引にアームを動かさないでください
- 鉗子挿入口に鉗子や持針器を差しっぱなしにすると、落下し破損の危険性があります
- 吸盤に離型剤・オイル・酸などを付けないでください
- 吸盤の素材は汗に弱いので、触れないでください
- 接地面表面が粗い場合、設置はできません
- 把持部を開いた鉗子や持針器を挿入口に差し込まないでください
- 吸盤を固定した状態で強引に引っ張らないでください
- ポートが付いているゴム部分を傷つけると裂けます
- ウェットラボでのご使用の際は、汚染されないようにしてください
- 吸盤が切れないようにしてください
- 使用後は設置場所から外し、アームノブを緩めて保管してください
- 設置される際は、そこが汚れがないか確認をしてください

LapaSta has changed the concept of dry boxes.

品質について

- アームと吸盤の接続部に緩みがないように治具で調整
- 吸盤に切れ目や汚れがないか目視確認
- 鉗子挿入口及びゴム全体に亀裂がないか目視確認
- 鉗子挿入口のゴムがしっかりとアームに収まっているか目視確認
- 鉗子挿入口にポートを挿入した際に、ゴムに亀裂などが目視確認
- 吸盤が作動するか、吸盤レバーの解除・締るを繰り返して確認
- ラパスタをアクリル板へ設置し、4時間転倒しないことを確認
- アームノブを緩めて金属ヘッドボールが回転するかを確認
- 設置後、鉗子挿入口から持針器を挿入して吸盤が動かないか確認

LapaSta has changed the concept of dry boxes.

Japan Polymer Technology



Shifting the view for new beginnings

LapaStaは商標です。

商 標 LapaSta

登 録 第5701457号

登録日 平成26年9月12日

LapaSta®を弊社の許可なく、
ホームページ、SNS、広告などに
掲載することを禁じます。



LapaSta has changed the concept of dry boxes.

Japan Polymer Technology



Shifting the view for new beginnings

お問い合わせ

日本高分子技研株式会社

〒103-0027

東京都中央区日本橋3-2-14


日本橋KNビル4階

電話：03-5201-3735

井上雅司 inoue@jptc.co.jp



Official site

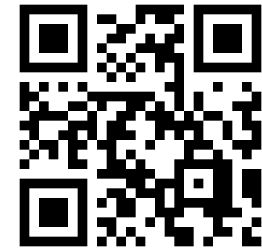

JPTC Shop

LapaSta has changed the concept of dry boxes.