

Japan Polymer Technology Co., LTD

練習用持針器・腹腔鏡手術下縫合練習用製品のパイオニア

日本高分子技研株式会社

Company & Products We Carry

JPTC Laparoscopic Training Lab that fits in your bag






漢字モデル
Kanji Model


Kanji Model

漢字モデル Kanji Model for suture training

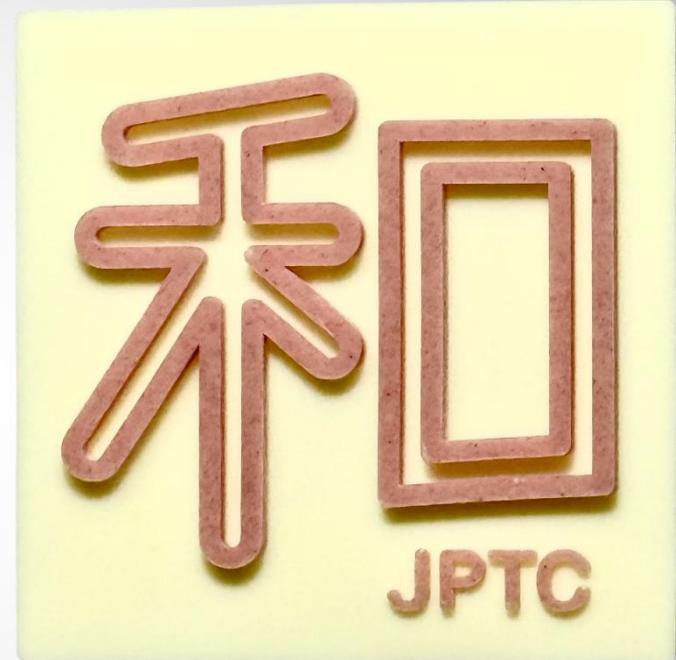


モデル裏面の粘着性を利用して固定します。
クリップやピンなど必要ありません。
植物性由来の材料ではないので腐敗しません。
専用ケース付き
サイズ：90mm*90mm*3mm
重量：40g (ケースを除く)

- ・丁寧な縫合技術と集中力が養われます。
- ・溝を縫い合わせて漢字を完成させます。
- ・置き方を変えると見え方が変わります。
- ・ゲーム性があり、退屈しません。
- ・定価：¥7,000 (送料、消費税別)

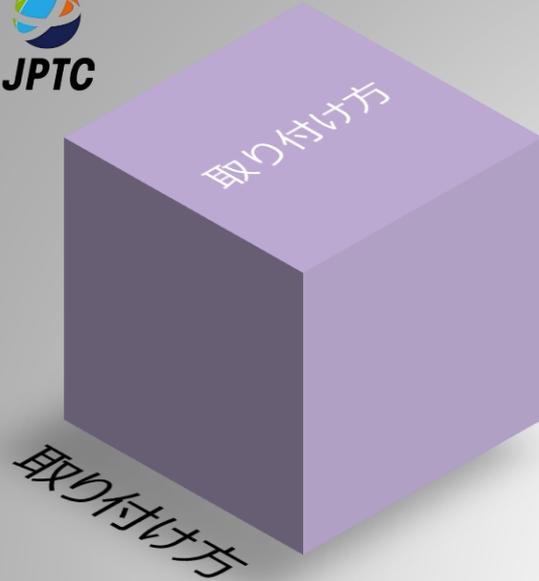

漢字モデル Kanji Model for suture training

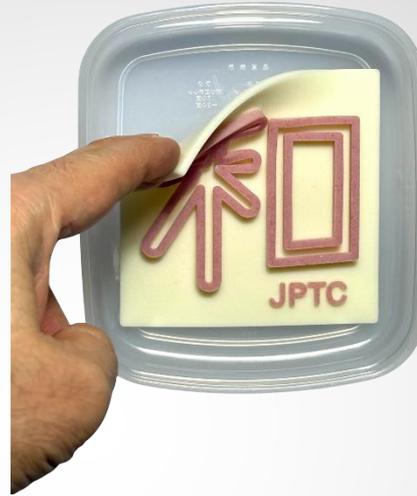

- 設置するトレーニング台の上を埃などがいないよう綺麗にしてください。
- 専用ケースに入っている漢字モデルの角を指の腹でゆっくりと剥がしてください。
- 取り外しましたら、トレーニング台に置いてください。
- モデル裏の粘着性で固定ができます。
- モニターを見ながら漢字モデルの位置を調整してください。

- トレーニング後は、モデルの角を指の腹でトレーニング台から剥がし、専用ケースへ入れてください。
- 専用ケースの蓋をして、直射日光、高温にならない場所へ保管してください。




漢字モデル

Kanji Model for suture training



1. 接地面に汚れがないことを確認してください。
2. モデルを指の先でつまんで引っ張ると切れることがあります。
3. モデルを剥がす際は指の腹でゆっくりと剥がしてください。
4. 書類などの上に置くと、モデルから書類が剥がれなくなります。
5. 赤い漢字を引っ張ると切れます。
6. 練習後は専用ケースへ入れて、直射日光や高温を避けて保管してください。
7. 乗用車など社内に置くと高温で劣化することがあります。
8. お子様の手の届かないところに保管してください。
9. 医療では使用できません。

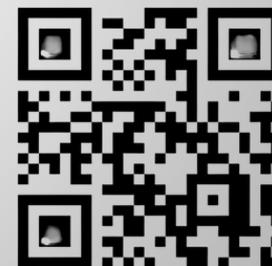

Shop