



日本高分子技研株式会社

JPTC MUGEN Model Stand



トレーニングは一つではありません。
視点を変えると無限の可能性が待っています。



ラパスタ、パームカメラスタンドとの
コラボレーションはトレーニングの
質を高めます。





使用方法

吸盤が設置できる**光沢面の場所**をご利用ください。光沢面でない場合は、**光沢の亚克力板**をご使用ください。

接地面に吸盤を軽く指で押さえ、もう一方の指でレバーを倒してください。（少々硬いと感じることがあります）

ノブを緩めて、モデル台を適当な位置に決めましたら、ノブを締めてください。

モデル台の面に漢字モデル 和や三層モデルを付けてください。

トレーニングを終えましたら、モデルをモデル台から取り外してください。吸盤の上部を軽く押さえ、レバーを持ち上げてください。レバーを上げてからも吸盤がついている場合は、爪を吸盤と接地面の間に差し込むと外れます。

ノブを緩めて、高温多湿の場所を避けて保管してください。





仕 様

製品名	ラパスタ (LapaSta®)
最大高さ・重さ	230mm・215g
吸盤仕様	Φ70mm PVC製 レバー操作
モデル台サイズ	100mm×100mm×3mm
モデル台材質	アルミニウム製
価 格	7,000円 (送料、消費税別)





ご注意事項

- 臨床では使用できません
- 吸盤が設置できる光沢面の場所をご利用ください
- 設置される際は、接地面の汚れや濡れていないか確認をしてください
- 吸盤を固定後、強引に引っ張らないでください。
- ノブを締めた後に、モデル板を引っ張ったり動かさないでください
- モデル台の角に手や指をひっかけると傷がつく可能性があります
- 吸盤に離型剤・オイル・酸などを付けないでください
- 吸盤の素材は汗に弱いので、触れないでください
- 接地面表面が粗い場合、設置はできません
- 吸盤に切れ目を入れると、使えなくなります
- モデル板に酸やアルカリを付けると腐食いたします。
- 使用後は設置場所から外し、アームノブを緩めて保管してください
- お子様の手が届かない場所に保管してください



品質について

- モデル台と吸盤の接続部に緩みがないように治具で調整
- 吸盤に切れ目や汚れがないか目視確認
- 吸盤が作動するか、吸盤レバーの解除・締るを繰り返して確認
- アクリル板へ設置し、4時間転倒しないことを確認
- ノブを緩めて金属ヘッドボールが回転するかを確認
- ノブを締めて、モデル台が固定されるか確認
- モデル台の傷の有無を目視確認



お問い合わせ

日本高分子技研株式会社

〒103-0027

東京都中央区日本橋 3 - 2 - 1 4

日本橋KNビル4階

電話：03-5201-3735

井上雅司 inoue@jptc.co.jp



Official site



JPTC Shop