

取扱説明書

添付文書


保証書付



家庭用電気マッサージ器 NK6040

ネックフィット

医療機器認証番号：305AKBZX00065000

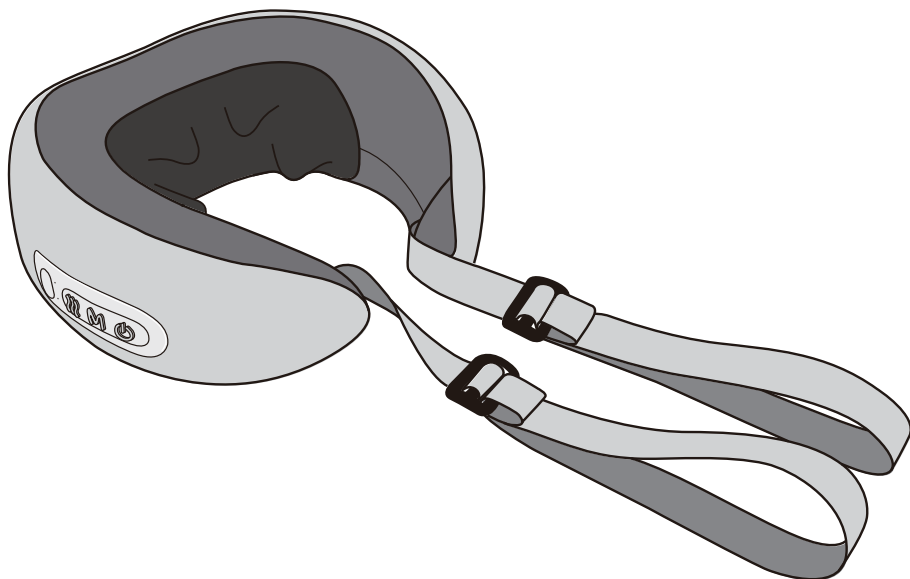

このたびは、本商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
なお、この取扱説明書には保証書がついています。お読みになられたあとも、
大切に保管してください。

2023年12月1日（第1版）

目次

安全上のご注意	1	お手入れ	14
使用目的または効果	5	保管について	14
各部の名称	5	電池の廃棄について	15
ご使用前のご確認	6	故障かなと思ったら	17
ご使用前の準備	6	仕様	18
使用方法	8	保証とアフターサービス	19

安全上のご注意


ご使用になる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するために必ずお守りいただくことを説明しています。

表示内容を無視して誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で示しています。

 **警告** 死亡や重傷を負うおそれがある内容です。


 **注意** 軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容です。

●お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

 してはいけない内容です。

 実行しなければならない内容です。

 **警告**

	次の人は使用しないでください。症状を悪化させるおそれがあります。
	・ 医師からマッサージを禁じられている人 例：血栓（そく（塞）栓）症、重度の動脈瘤、急性静脈瘤、各種皮膚炎、皮膚感染症
	自分で意思表示のできない方や身体の不自由な方には使用させないでください。けがの原因になります。
	幼児やお子様に使させたり、本体で遊ばせたりしないでください。
	保護カバーを外した状態や、破れた状態で使用しないでください。
	保護カバーが破れた場合は勝手に修理などせず、お買い上げの販売店または製造販売元に連絡してください。 事故やけがの原因になります。
	マッサージ以外の用途には使用しないでください。 事故やけがの原因になります。
	マッサージ部周辺にアクセサリなど硬いものをつけて使用しないでください。 事故やけがのおそれがあります。

警告



頭、顔、のど、胸部、皮膚の弱い部分、ひじ、ひざなどの骨部には使用しないでください。
事故やけがのおそれがあります。

首周辺をマッサージするときは、マッサージ部の動きに注意してください。また、首の前方はマッサージしないでください。

事故や体調不良の原因になります。

使用中は眠らないでください。

無意識での使用は身体への異常やけがの原因になります。

本体を布団やコタツの中に入れて使用しないでください。

事故・低温やけどのおそれがあります。

動作中、マッサージ部に手や指を差し込まないでください。

けがの原因になります。

充電コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしないでください。

感電・ショート・火災の原因になります。

充電コードが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。

感電・ショート・火災の原因になります。

他のマッサージ器や治療器と併用しないでください。

事故やけがのおそれがあります。



次のような人は必ず医師とご相談の上ご使用ください。

事故や健康を害するおそれがあります。

- ・ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している人
- ・悪性腫瘍のある人
- ・心臓に障害のある人
- ・温度感覚喪失が認められる人
- ・妊娠初期の不安定期または出産直後の人
- ・背骨（脊椎）に異常のある人や曲がっている人
- ・糖尿病などによる高度な末しょう（梢）循環障害からくる知覚障害のある人
- ・皮膚に創傷のある人
- ・安静を必要としている人や体調がすぐれない人
- ・骨粗しょう症の人、せきついの骨折、ねんざ、肉離れなど、急性（とう（疼）痛性）疾患の人

警告



- ・ 体温38℃以上（有熱期）の人
例：急性炎症症状（倦怠感、悪寒、血圧変動など）の強い時期、衰弱しているとき
- ・ その他、医療機関で治療中の人
- ・ 腱鞘炎の人

使用中身体に異常を感じたときはすぐに使用を中止し、医師に相談してください。
健康を害するおそれがあります。

使用しても効果が現れない場合は医師または専門家に相談してください。
事故や健康を害するおそれがあります。

使用前に保護カバーに破れが無い確認し、破れがある場合は使用を中止してください。
事故やけがの原因になります。

お手入れの際は、必ずコンセントからACアダプターを抜いてください。
また、濡れた手で抜き差ししないでください。
感電やけがの原因になります。

電源は交流用100V専用コンセントを使用してください。
火災やけがの原因になります。

コンセントから抜くときは、ACアダプター本体を持って引き抜いてください。
感電・ショート・発火の原因になります。

充電の際は、付属の専用充電コードを使用してください。
故障の原因になります。

ACアダプターは指定されたものを使用してください。
指定されていないアダプターを使用すると故障の原因になります。

停電のときはすぐに電源を切ってください。
感電やけがの原因になります。

故障を発見したときはすぐに使用を中止し電源を切ってください。
事故やけがの原因になります。

改造はしないでください。また、機器が故障した場合には、勝手に修理などせず、
販売店又は製造販売元に連絡してください。
火災・感電・けがの原因になります。

施療部位に装身具をつけて使用しないでください。
けがの原因になります。

首の前方をマッサージしたり、喉を圧迫するような使い方は絶対にしないでください。
事故やけがの原因になります。

注意



浴室など湿気の多い場所では使用しないでください。また、水などの液体がかからないようにしてください。

感電や故障の原因になります。

布団の中や、毛布などをかぶせて使用しないでください。

本体内部が高温になる可能性があります。

この商品1台を、複数の人で同時に使用しないでください。

故障や事故の原因になります。

製品の上に立たないでください。

故障や事故の原因になります。

本体やマッサージ部の上に立ったり、座ったりしないでください。

事故や故障、けがのおそれがあります。

マッサージ部に勢いよく脚をおろしたりしないでください。

事故や故障、けがのおそれがあります。



使い始めは5分程度を目安に、弱い刺激でご使用ください。

初めからマッサージの刺激を強くすると、健康を害するおそれがあります。

1回の使用は10分以内とし、1日の使用は30分以内を目処にご使用ください。

長時間の連続使用は、必要以上の刺激となり逆効果やけがの原因になります。

マッサージの刺激が強すぎると感じたときは、弱く当ててください。

強い刺激のまま使用を続けると、健康を害するおそれがあります。

使用中、肌に赤みが出た際は、使用を中止してください。

刺激が強い可能性があります。タオルなどをあてがいご使用ください。

同一箇所への連続使用は避けてください。

長時間の連続使用は、必要以上の刺激となり逆効果やけがの原因になります。

本商品に、大きな荷重がかかるような使い方をすると、保護装置が作動し、動作が止まる場合があります。

停止した場合は、しばらく本体を1時間程度休ませてから再度動作させてください。


使用目的または効果

使用目的または効果

あんま・マッサージの代用。一般家庭で使用するこ


各部の名称

■本体

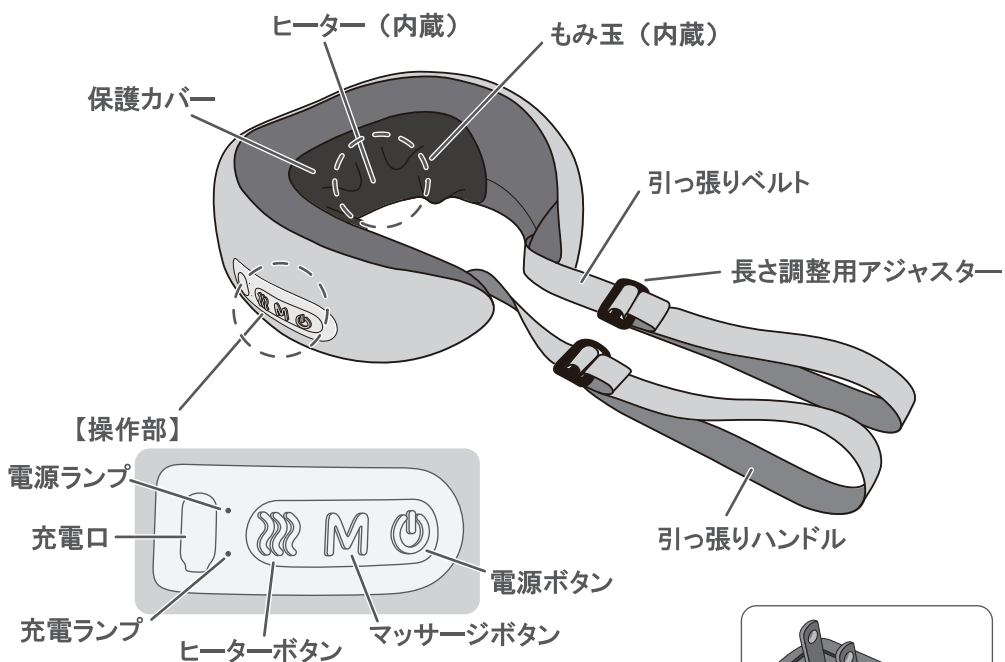

■付属品

アダプター側

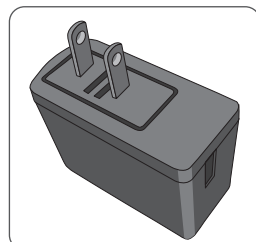

ACアダプター（別売）
Model No:UMB305-0510

取扱説明書・保証書（本書）

ご使用前のご確認

- ご使用前に保護カバーに破れがないかを確認してください。どんな小さな破れ、ほころびでも、破れている場合は使用しないでください。
- 保護カバーが破れた場合は、お買い上げの販売店または弊社に修理を依頼してください。
- ご使用前に操作部や、タイマーが正常に動作するか確認してください。
- 使い始めは弱い刺激でマッサージしてください。
- 施療部位に痩身具をつけて使用しないでください。
- 喉を圧迫するような使い方は絶対にしないでください。
- 首の前方をマッサージしないでください。
- しばらくご使用しなかった場合、もう一度、取扱説明書をよく読み、機器が正常に安全に動作することを確認してからご使用ください。
- 商品に大きな荷重がかかるような使い方をする、安全装置が作動し、動作が止まる場合があります。
- 停止した場合は、本体を1時間程度休ませてから再度動作させてください。

ご使用前の準備

初めてのご使用時、または長期間ご使用されていなかったときは、電池が放電し作動しないことがありますので、充電してからご使用ください。

1. ACアダプターに充電プラグを差し込む。

※ACアダプターは別売です。

充電プラグ（アダプター側）


※

ACアダプター（別売）


必ず付属の専用充電コードをご使用ください。

別売のACアダプターまたは、「DC 5V/1A」仕様のもの（右記の専用充電コードが差し込めるお手持ちの充電用ACアダプター）をご使用ください。


【専用充電コード】

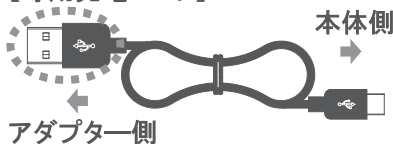

2. ACアダプターをコンセントに差し込む。

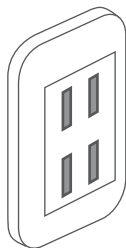


コンセント

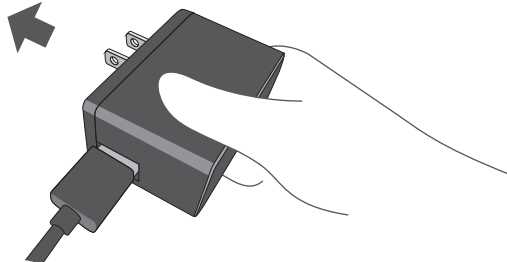

ご使用前の準備（つづき）

3. 本体の充電口に充電プラグ（本体側）を差し込む。

充電カバーを強く引っ張らないでください。

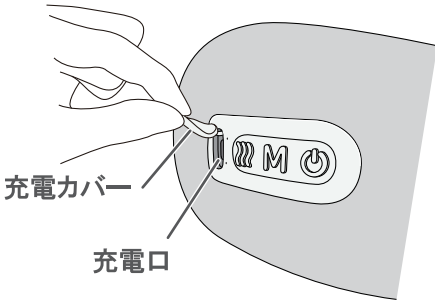


充電カバーを開く




充電カバーを押さえながら差し込む

- 充電中は充電ランプがオレンジ色でゆっくり点滅します。

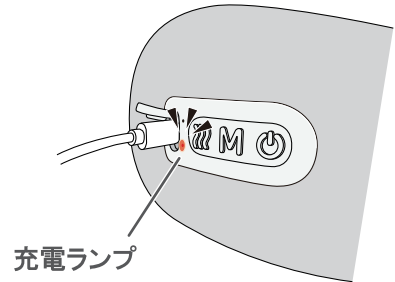

- 充電完了後は充電ランプが消灯し、電源ランプが緑色で点灯します。

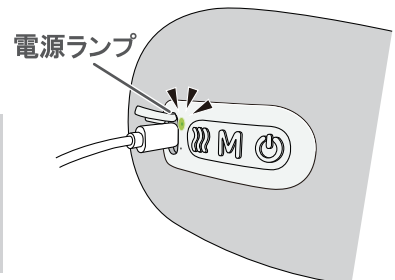


長期間ご使用にならない場合でも、3か月に1回を目安に充電してください。

※充電機の機能低下や故障の原因となります。

使用方法

引っ張りハンドルを持ち、お好みのもみ強さに合わせて矢印の方向に引っ張ってください。


首肩

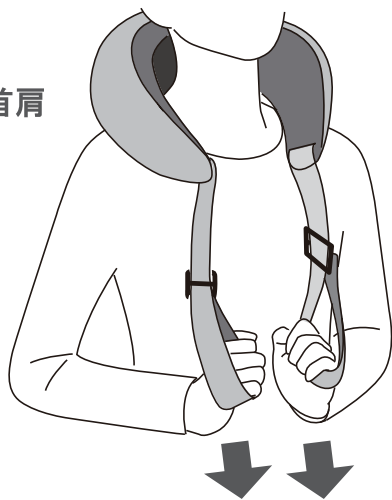


髪の毛の巻き込みがないようにご注意ください。

■引っ張りベルトの長さの調整方法

必要に合わせて、長さ調整用アジャスターで調整してください。

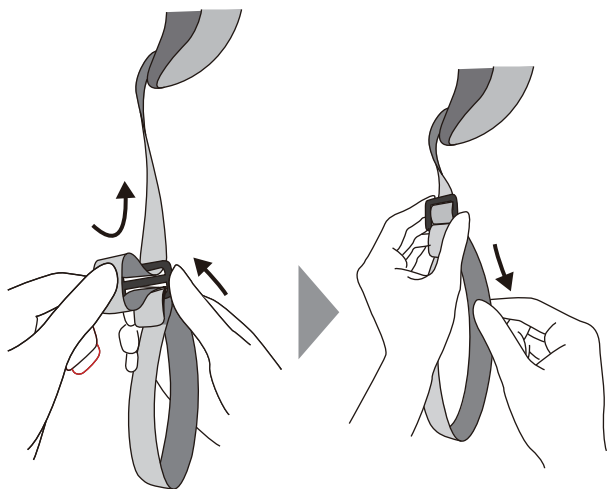

《短くする場合》

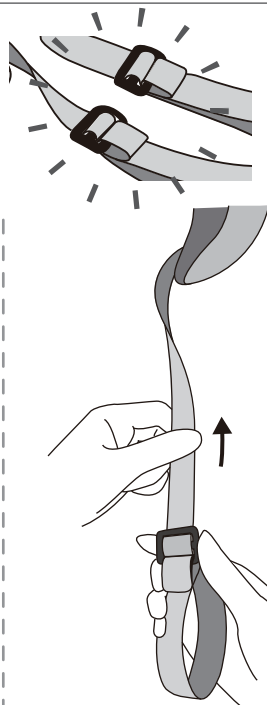


《長くする場合》

使用方法（つづき）

電源ボタンを長押し（約2秒間）、電源を入れます。

（「ピー」と音が鳴り、電源ランプが緑色で点灯します）

※電源を入れたあと、無操作のまま2分間経過すると、自動で電源が切れます。

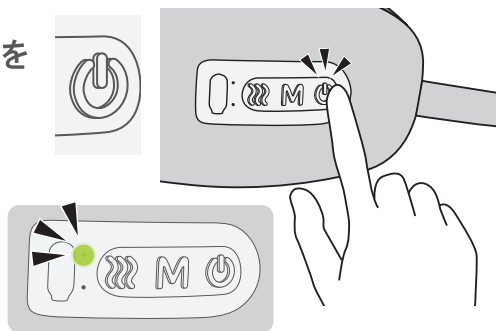


● マッサージを行う場合



マッサージボタンを押すと、ピッと音が鳴り「正転モード」が開始されます。その後、再度マッサージボタンを押すとモードが切り替わります。


（ピッ） 正転モード → （ピピッ） 反転モード → ※ （ピピピッ） 自動切り替えモード → （ピー） 停止

※正転・反転が自動で切り替わります。

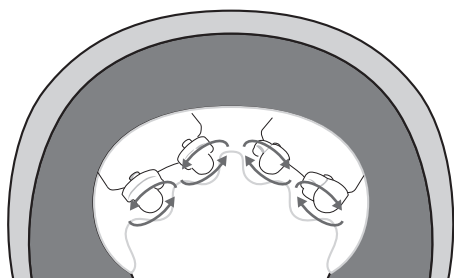


正転モード

もみ玉の動き

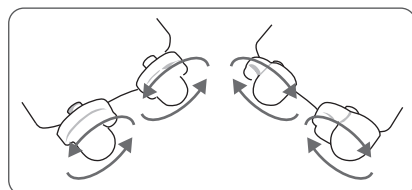


外側から内側へもむ

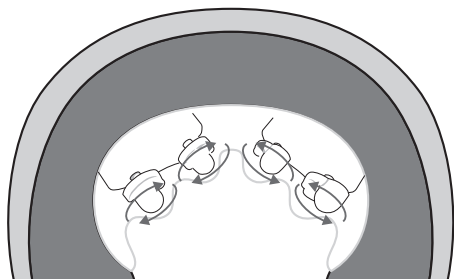

反転モード

もみ玉の動き

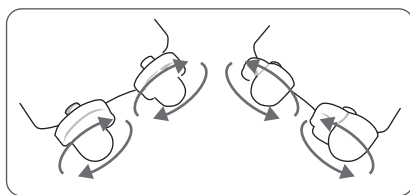

内側から外側へもむ

使用方法（つづき）

●ヒーターを使用する場合



ヒーターボタンを押すと、ピッと音が鳴り「弱」から開始されます。その後、繰り返しヒーターボタンを押すとヒーターの強さが3段階まで切り替わります。



ヒーターの温まりには環境によって異なります。

マッサージボタンとヒーターボタンをそれぞれお好みの設定を行うことで、マッサージとヒーターを同時に使用することが可能です。


10分間の動作のあと、自動で電源が切れます。

途中で動作を終了する場合は、電源ボタンを長押し（約2秒間）、電源を切ります。



10分間ご使用後、再度ご使用になる場合は30分間は時間を空けてください。

充電お知らせ機能



バッテリーの電池残量が減ると、充電ランプがオレンジ色で点滅します。電源終了後、約1分間点滅して充電が必要であることをお知らせします。ご使用後に充電ランプが点滅している場合は充電してください。

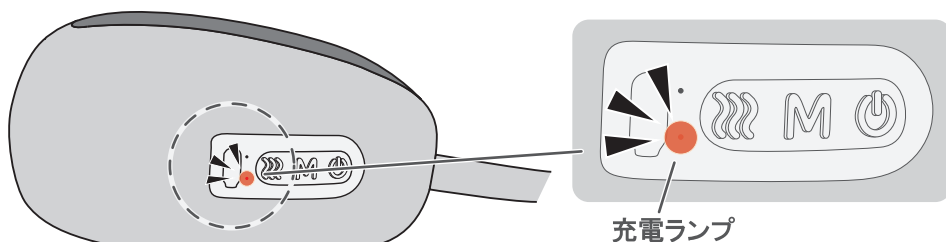

■ マッサージの使用例

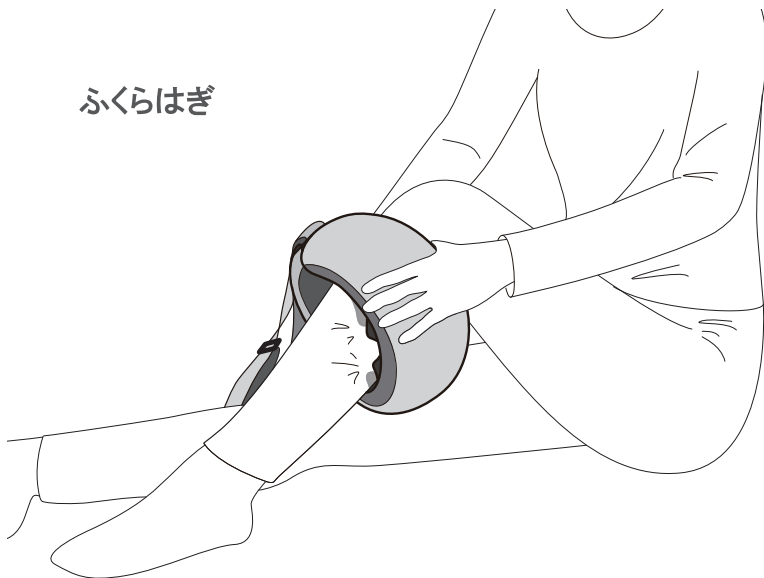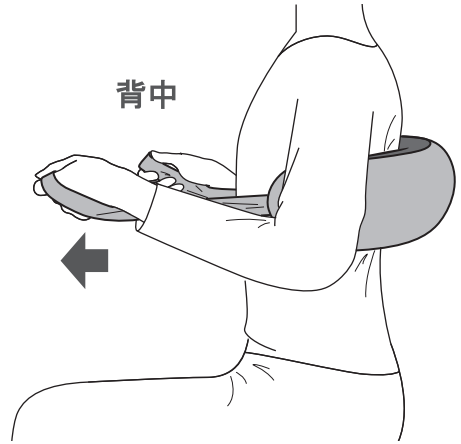

■ マッサージの使用例

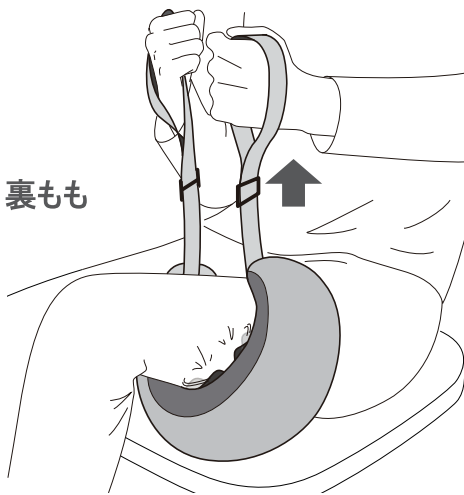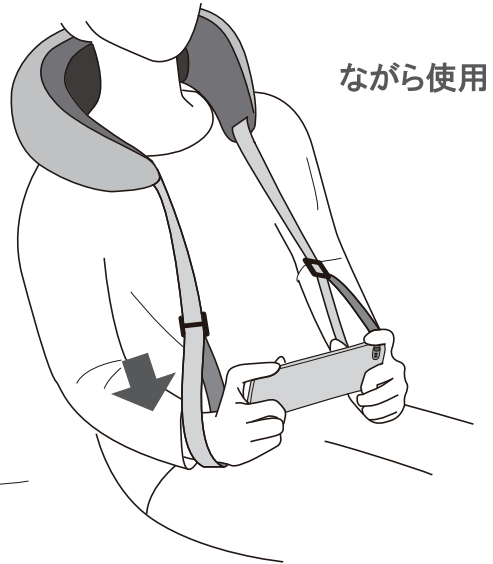

使用方法（つづき）


下記のような取り扱いやご使用はしないでください。

⚠ 警告

- 頭部・ひじ・ひざなどの骨部や、顔・腹または皮膚の弱い部分には使用しないでください。※けがや体調不良の原因となります。

⚠ 注意


- 全体重がかかる姿勢でのご使用はしないでください。
マッサージ部に無理な力が加わると、動作が止まることがあります。
もみ玉の回転が止まるような力を加えないでください。
故障や事故の原因となります。
- もみ玉の刺激が強いと感じた際は、タオルをあてがうなど強さを調節してください。

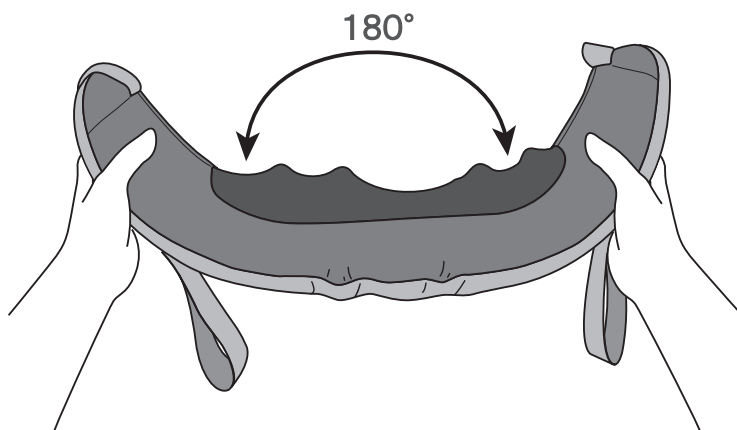

- 本体を180°以上上げたり、過度に開閉を繰り返したりしないでください。
断線など故障の原因となります。

お手入れ

- やわらかい布で乾拭きしてください。
 - 汚れのひどいときは、ぬるま湯でうすめた中性洗剤にやわらかい布を浸し、よく絞って拭き、最後に乾いたやわらかい布で乾拭きしてください。
- ※変色などの防止のため、シンナーやベンジンなどは使用しないでください。

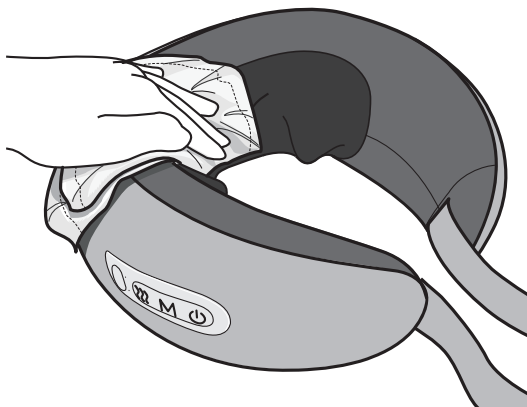

保管について

- コード類は、ねじれをほどこいてから保管するようにしてください。
 - 汚れやホコリを取り除き、高温・多湿、直射日光をさけた場所に保管してください。
 - 長期間ご使用にならない場合は、カバーをかけるなど、ホコリがつかないようにしてください。
 - 保管の際、変形しないよう製品の上に物を置かないでください。
 - 子供の手の届くところには保管しないでください。
 - 保管の際、製品に異常がないか定期的に点検してください。
 - 長期間ご使用にならない場合は、満充電の状態のできる限り常温（10℃～30℃）で保管してください。
 - 長期間ご使用にならない場合でも、3か月に1回を目安に充電してください。
- ※充電機能低下や故障の原因となります。

電池の廃棄について


本製品は、リチウムイオン充電電池を使用しています。本製品を廃棄される際は、自治体の分別ルールに従い廃棄してください。

- 製品を廃棄するとき以外は絶対に分解しないでください。
- 必ず本体からACアダプターを取り外してから分解してください。
- 充電残量がある場合は、動作しなくなるまで何回か使用し電池を使い切ってください。




イラスト図は、製品を廃棄するための分解図です。
修理用のイラスト図ではありません。

1. 操作部のカバーをマイナスドライバーなどで外す。

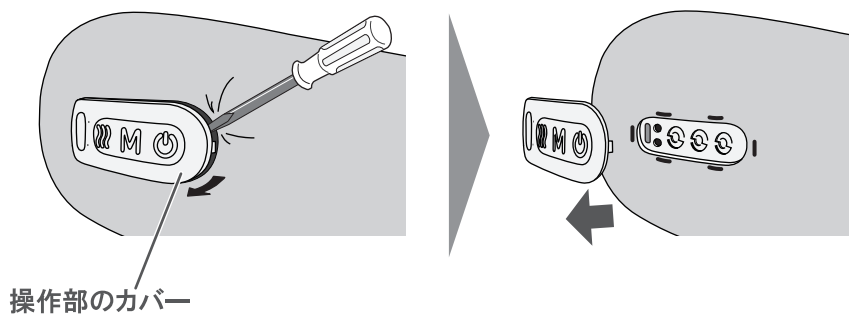


2. ハサミなどで周囲を切り開き、本体からユニットを取り外す。

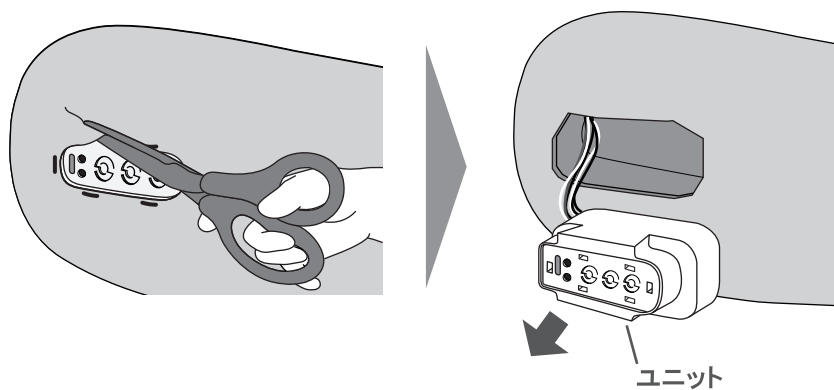


電池の廃棄について（つづき）

3. 裏フタの固定ビスを
プラスドライバーで取り外す。

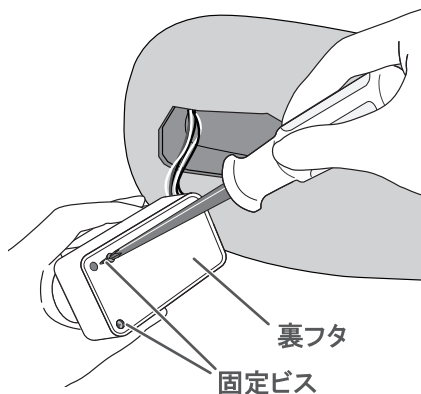

4. 裏フタをマイナスドライバーなどの細いものを差し込み、押し開ける。
（裏フタにはリチウムイオン充電電池があります）

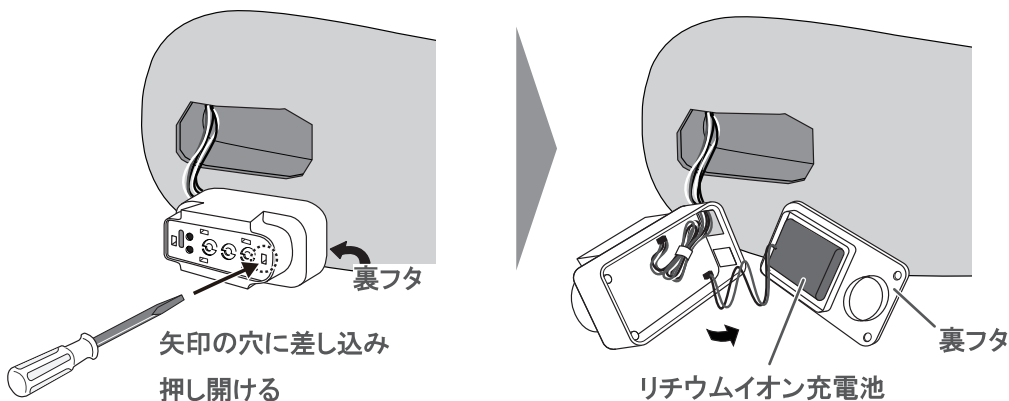


5. リチウムイオン充電電池の配線コードを
1本ずつハサミなどで切り、取り外す。



必ず1本ずつ切ってください。
2本同時に切るとショートしてしまい危険です。

取り外したリチウムイオン充電電池の配線コードの
切断部を、絶縁テープなどで絶縁する。

リチウムイオン充電電池は、裏フタから無理やりはがさず、その
ままの状態に充電式電池リサイクル協力店へお持ちいただくか、
各自治体の分別ルールに従って廃棄してください。

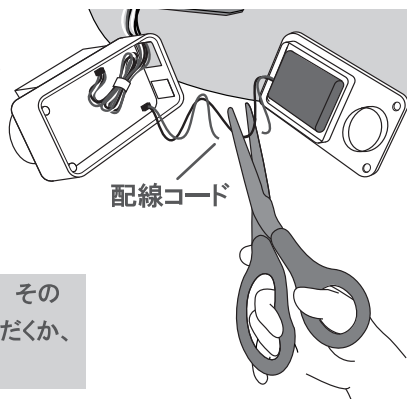

故障かなと思ったら

修理を依頼される前に、再度点検してください。それでも正常に動作しないときはお買い上げの販売店または日光精器株式会社サービス窓口まで依頼してください。

絶対に分解したり、修理・改造はしないでください。けがや事故のおそれがあります。

■修理を依頼される前に以下のことをお確かめください。

症状	推定されること
動かない	電源が入っているか。マッサージボタンが押されているか確認してください。ボタンを押しても音が鳴らない場合は、電池残量がなくなっている可能性があります。再度充電してください。
運転中に途中で停止した	安全装置が作動し、モーターが止まる場合があります。電源ボタンを長押し（約2秒間）し直して、再度、運転を再開させてください。
	電池残量がなくなっている場合は、再度充電してください。
	電源ボタンを押してから、無操作の状態が2分間経過すると自動で電源が切れます。また、マッサージボタンを押してから10分間経過すると、自動で電源が切れます（ヒーターボタンも押してから10分間動作しますが、タイマーはマッサージボタンが優先されます）。
異音がる	マッサージの構造上発生する動作音であり、異常ではありません。
充電できない	充電コードが本体とACアダプターに正しく接続されているか確認してください。
	長期間、充電を行わないと充電電池の機能低下や故障の原因となります。3カ月に1回を目安に充電してください。

仕様

類別	機械器具77 バイブレーター
医療機器分類	管理医療機器
一般的名称	家庭用電気マッサージ器 (JMDNコード 34662000)
販売名	家庭用電気マッサージ器 NK6040
品番	NK6040
医療機器認証番号	305AKBZX00065000
使用目的または効果	あんま、マッサージの代用。一般家庭で使用すること。 ●疲労回復 ●血行をよくする ●筋肉の疲れをとる ●筋肉のこりをほぐす ●神経痛・筋肉痛の痛みの緩解
電気定格	DC3.7V 3.3W(ヒーター2.7W)
アダプター定格	(入力) AC100-240V 50/60Hz 0.12-0.16A (出力) 5V/1A
モード	(マッサージ) 正転/反転/自動切り替え (ヒーター) 弱(約36℃)/中(約38℃)/強(約40℃)※1
タイマー	10分
使用電池	リチウムイオン充電電池 3.7V 2500mAh
充電時間	約4時間
使用可能回数	(マッサージのみ) 約12回 (マッサージ+ヒーター強のとき) 約8回 ※2
製品サイズ	(本体) 約260×250×115mm (引っ張りベルト) 最長約40cm
製品重量	約630g
もみ回転数	約90回/分
使用温度範囲	10~40℃
長期保管温度範囲	5~45℃/45~80%RH
生産国	中国
製造販売業者	日光精器株式会社 滋賀県近江八幡市馬淵町2660

※1 室温27℃で使用した結果であり、使用環境によって異なります。

※2 使用可能回数は、使用環境によって異なります。

保証とアフターサービス

保証書について

保証書はこの取扱説明書についておりますので、保証内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

保証期間はご購入日より1年間です。

修理のご依頼について

ご使用中に異常または故障が生じたとき、その他破損等が生じたとき、修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により修理をいたします。

保証期間中は、保証書記載内容により無料修理いたします。下記までご連絡ください。

補修用性能部品の保有期間について

日光精器株式会社では、この商品の補修用性能部品を製造打ち切り後3年間保有しております。

(補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です)

【日光精器株式会社サービス窓口】


〒523-0022 滋賀県近江八幡市馬淵町2660

TEL(0120) 250-846/FAX(0748) 37-2015

別売品について

(2023年12月時点)

※予告なく変更となる場合がありますので、予めご了承ください。

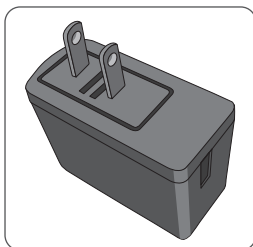

ACアダプター (別売)

Model No:UMB305-0510

別売品のご購入は、下記の販売ページよりご購入ください。

www.rakuten.ne.jp/gold/nicoja/

無料修理規定

1. 取扱説明書等の注意書に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理致します。
2. 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、商品と本書をご持参ご提示の上、お買い上げの販売店にご相談ください。
3. ご転居の場合は、事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
4. ご贈答品、ご転居等で本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理がご依頼できない場合には、日光精器株式会社サービス窓口へご相談ください。
5. 保証期間内でも次の場合は有料修理になります。
 - (イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障および損傷
 - (ロ) お買い上げ後の落下等による故障及び損傷
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷
 - (ニ) 一般家庭用以外に使用された場合の故障及び損傷（例：業務用の長時間使用、車両、船舶への搭載等）
 - (ホ) 本書の提示がない場合
 - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店の記入のない場合、或いは字句を書き替えられた場合
 - (ト) ご使用による汚れ、破損、損傷
 - (チ) 消耗部品
6. 本書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
7. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。
 - ※お客様にご記入いただいた個人情報（保証書記入内容）は、保証期間内の無料修理対応及び安全点検活動のために利用させていただきますのでご了承ください。
 - ※この保証書は、本書で明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権限を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店又は、日光精器株式会社サービス窓口にお問い合わせください。

保証書

販売名	家庭用電気マッサージ器 NK6040	
保証期間	お買い上げ日より1年間	
お買い上げ日	年 月 日	
お客様	〒 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
	ご住所	
	お名前	様
	お電話	()
販売店	住所・店名	
	電話	()

本品は取扱説明書に記載の無料修理規定内容で無料修理を行うことをお約束するものです。ご記入いただきました個人情報の利用目的は無料修理規定に記載しております。内容をご参照ください。販売店欄に記入のない場合は無効となりますので、必ず記入の有無をご確認ください。もし記入のない場合は、直ちにお買い上げの販売店にお申し出ください。(国内専用)



NIKKO SEIKI CO.,LTD.

日光精器株式会社

〒523-0022 滋賀県近江八幡市馬淵町2660
TEL(0120)250-846/FAX(0748)37-2015