


マイクキャップの取り付け方・取り外し方

正しく測定するためにはマイクキャップが必要となります。

端末本体からマイクキャップが外れた場合、または付属のマイクキャップ予備品（別売で購入可能）と交換する場合は以下を参照してください。

マイクキャップの取り付け方


1

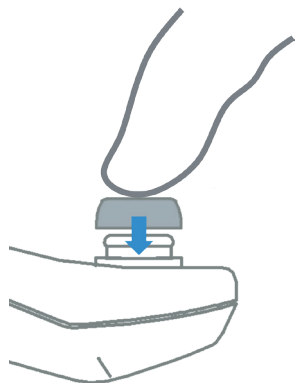

①マイクキャップを上から押し込む
(回りが隙間なくはまっていること)


マイクキャップの取り外し方

1

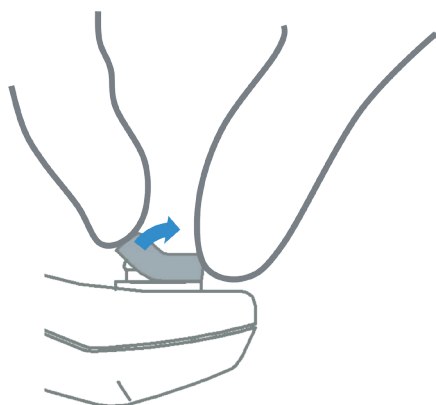

①マイクキャップの端から指で持ち上げる

2

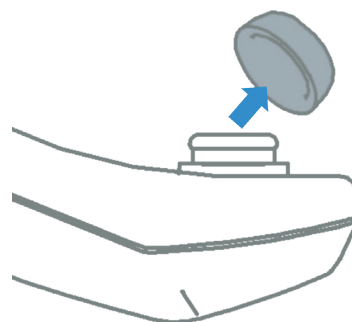

②上に引っ張る

スリームフィット（別売）の取り付け方


お客様が選択したネックバンドがゆるい、隙間ができる場合は、スリームフィットをネックバンドに差込んでご使用ください。

首にSleeim を装着した際、首にSleeim がしっかりと固定できていることをご確認ください。

【例】 バンドサイズ M（100）ではきつい。L（120）では少しゆるい。


→ L（120）でスリームフィットをご使用ください。

1

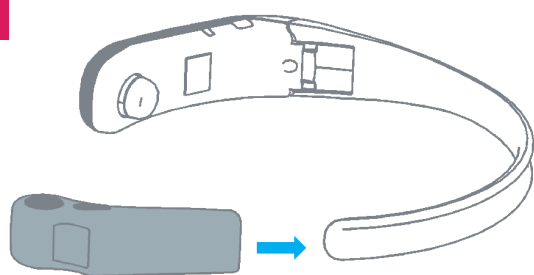


①ネックバンドの端から差し込む

2

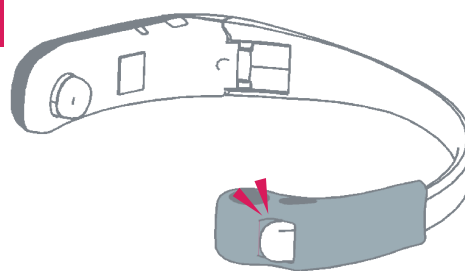

②スリームフィット取り付け後、
ネックバンドの先端がしっかりと
見えるように突き出す



3

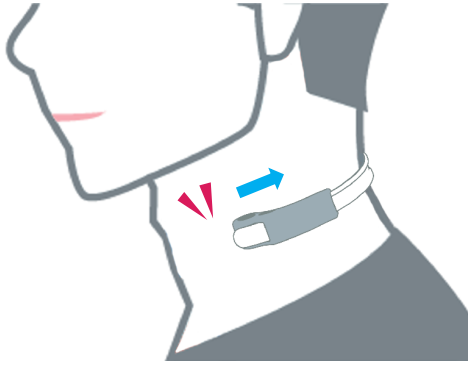

③スリムフィットを付けた Sleeim の装着

Sleeim 装着後、緩みや隙間がある場合、スリムフィットを移動させ安定して固定できる位置まで差し込んで調整してください。

⚠ マイクキャップ・スリムフィットの注意事項

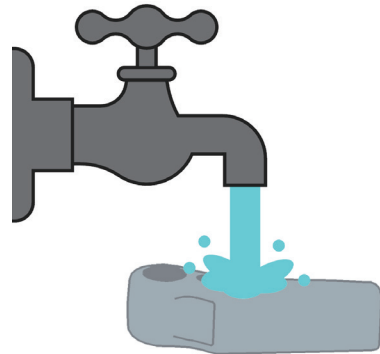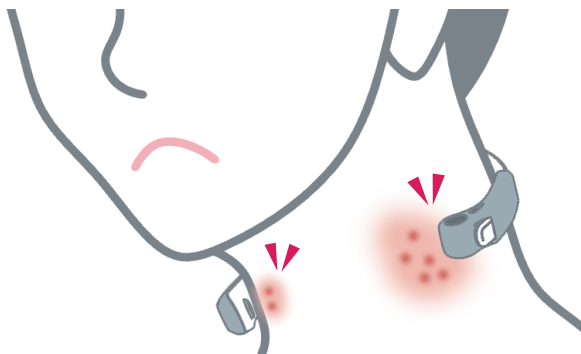

注意

- ・ マイクキャップ、スリムフィットをご使用になる場合、汗や皮脂による雑菌によって、かゆみ、かぶれ等が現れる場合もありますので、水で洗浄または拭き取り清掃を行い、十分乾燥させてからご使用ください。
- ・ アルコール・塩素・漂白剤・抗菌剤などを含む製品で本品を洗浄、または拭き取りを行わないでください。
- ・ マイクキャップ、スリムフィットの長時間の使用により、肌に違和感や異常を感じた場合、また本品によるアレルギーが生じた場合には直ちにご使用を中止してください。
- ・ マイクキャップにヒビが入るなどの性能低下を認められた場合には直ちに新品と交換してください。
- ・ マイクキャップ、スリムフィット、およびポリ袋は子どもが誤飲するおそれがあるため、子どもの手の届かない場所に保管してください。

6. 充電方法

初めて使用する場合や電池残量が少ない場合は、市販の USB 充電器を使用して Sleeim 本体を充電してください。

※電池残量はペアリング後、設定変更などの通信を行うとアプリのホーム画面で確認することができます。



注意

- ・ 初めて使用する場合はフル充電してください。
- ・ 長期放置などで充電が切れた場合は、充電完了後も電源は OFF のままになります。その際は、電源 ON 操作およびペアリングが必要になります。