手すり施工・取扱説明書

KH−44 ※必ず施工前にお読みください。 また本説明書は取付け後も廃棄せずご使用者にお渡しください。

P25

475

ツメ

金具

手すり本体

キャップ

KAWAJUN

キャップ

バネ座金

本体取付けネジ


◎取付け手順

- ①取付け位置を決め、手すり本体を本体取付けネジとバネ 座金にて壁に取付けます。
- ②キャップを、手すり本体の小口側からA方向に差込みます。差込んだ状態でB方向に押します。ツメが金具に掛かっているのを確認してください。

▲ 取付けに関するご注意

- ●石膏ボードなどに取り付ける場合、最低12mm以上の裏板を使用してください。
 - ※強度のない壁・補強のない壁には取付けないでください。
- ●取付け後、必ず製品が完全に固定されているかご確認ください。固定が不完全な場合、製品のガタツキ、落下等の原因となります。
- ●屋外や浴室など水がかかったり湿気が多い場所には設置 しないでください。部品などが腐食して、破損や落下等 の原因となります。
- ●付属ネジ以外を使用しないで下さい。取付け強度が不足

下地取付例

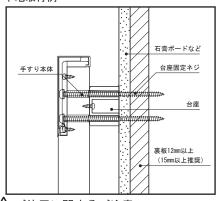

⚠ ご使用に関するご注意

- ●本製品の耐荷重は60kgfです。それ以上の荷重を加 えますと破損してケガをするおそれがあります。
- ●用途以外のご使用はしないでください。はずれたり してケガをするおそれがあります。



<u>キャップ</u>

キャップを外す場合は、キャップの裏側のすき間に、小さめのマイナスドライバーを差し込み、ツメを外しキャップを、矢印の方向に押すと外れます。

無理に外そうとすると破損するおそれがあります。

NO. 005

KAWAJUN www. kawa jun. co. jp