

# ブーストプレスベルト

取扱説明書

家庭用運動器具

型番 BBB-100



1年間保証書付

この度は「ブーストプレスベルト」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

- ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
- ご使用前に必ず「安全上のご注意」をお読みください。
- 取扱説明書および保証書は大切に保管し、必要なときにご利用ください。
- 本製品の形状は安全性向上のため、予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

# もくじ

1. 安全上のご注意	-----	P 3
2. 使用前のご注意	-----	P 4～6
3. 各部の名称・付属品	-----	P 7
4. ご使用の流れ	-----	P 7
5. 使用前の準備	-----	P 8
6. 装着の仕方	-----	P 9
7. 使用方法	-----	P 10
8. お手入れの仕方	-----	P 11～12
9. 保管の仕方	-----	P 12
10. よくあるご質問	-----	P 13
11. 故障かなと思ったら	-----	P 13
12. 廃棄について	-----	P 14
13. 仕様	-----	P 15
14. 保証規定	-----	P 16



## 安全上のご注意

ブーストプレスベルトは、EMS（電気刺激）の作用でお腹まわりの筋肉をトレーニングする目的に使用するものです。

この用途以外でご使用になった時の怪我や事故・故障その他不具合については、責任を負いかねますのでご了承ください。

下の警告・注意サインが付いている文章は、必ずお読みください。

表示と意味は以下のとおりです。

サイン	内 容
 <b>警 告</b>	人が死亡または重症を負う可能性が想定される内容を示します。
 <b>注 意</b>	人が障害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容を示します。

### 警 告

- 下記の項目に該当する方は本製品を使用しないでください。
  - (1) 次のような医用電子機器を使用している方
    - ・ペースメーカーなど体内植込み型医用電子機器
    - ・人口心肺などの生命維持用医用電子機器
    - ・心電計などの装着型医用電子機器
  - ※ 上記に当てはまる方は、本品を使用中の方にも触れないでください。
  - ※ 本製品を装着した状態で、植込み型医用電子機器を装着した方の装着部位に近づかないでください。
  - (2) 動脈リゅう、静脈リゅうなどの重度の血行障害や血栓症等のある方
  - (3) 使用部位に傷などの異常や各種皮膚炎及び皮膚感染症、皮下組織の炎症のある方
  - (4) 骨粗しょう症の方 (5) 妊娠中や出産直後の方
  - (6) 幼児や子供、及びご自分で意思表示ができない、本書の内容を理解できない方
  - (7) 医師が使用を不適切と認めた人
- 医師の治療を受けているときや下記の方は必ず医師に相談のうえ使用してください。
  - (1) 心臓疾患のある方、またその疑いがある方
  - (2) 脊椎や腰部に疾患（脊柱管狭窄症、椎間板ヘルニア、座骨神経痛、骨折、肉離れなど）や痛みのある方
  - (3) 敏感肌や肌の弱い方及びアトピー性皮膚炎の方 (4) アレルギー体質の方
  - (5) かつて治療をうけたところ、または疾患部へ使用する方
  - (6) 怪我している方、または手術直後の方
  - (7) 糖尿病などによる硬質な末梢循環障害による知覚障害のある方
  - (8) 脳神経に異常を感じている方（てんかんなど） (9) 悪性腫瘍のある方 (10) 生理中の方
  - (11) 血圧に異常のある方、高血圧の方及び紫斑になりやすい方
  - (12) 使用部位に金属、プラスチック、シリコンなどを埋め込んでいる方
  - (13) 使用部位に刺青（タトゥー）を入れている方 (14) 皮膚に知覚障害がある方
  - (15) 発熱（38℃以上）している、及び体調がすぐれない方
  - (16) 安静を必要とする方 (17) 上記以外にご使用に関して不安がある方
- 次の部位には使用しないでください。
  - ・粘膜及び肘・膝など関節、直接骨にあたる部位
  - ・傷口及び手術後の傷跡、及び皮膚の炎症を起こしている部位
  - ・本書の使用方法に記載されていない部位

## 使用前のご注意

### 警告

- ご使用前に本製品に破損がないかを確認してください。また、分解や改造、修理を行わないでください。故障や事故の原因となります。
- ご使用中・ご使用後に気分が悪くなったり、痛みなど身体に異常を感じたときには、直ちに使用を中止し医師に相談してください。そのまま続けると症状の悪化につながるおそれがあります。
- 肌に EMS の強い痛みや違和感を感じた場合は使用を中止してください。肌と電極パッドの密着が十分でなかったり、肌が乾燥しているとピリピリと痛みを感じる場合があります。水分のある状態で、正しく装着して使用してください。
- 本製品のご使用時、電気刺激による筋肉の急な収縮で、身体が意図しない動きをする可能性があります。以下のような動作時には、本製品を使用しないでください。
  - ・調理や飲食
  - ・刃物や工具等、危険な道具の使用
  - ・階段の上り下り、高所、不安定、危険な場所での作業
  - ・その他、意図せず身体が動いた時に危険が伴う動作
- 使用中にいつもと違う音やニオイ、動作不良等が起きた際は直ちに使用を中止してください。
- EMS 電極パッド（通電部）に金属や物を当てないでください。ショート・発熱など故障や事故の原因となります。
- リモコンの充電口に異物を入れないでください。また、リモコンに強い衝撃を与えないでください。感電や故障、事故の原因となります。
- リモコンや充電用 USB コードを水につけたり、水洗いしないでください。感電や故障、事故の原因となります。
- 充電時は、市販の AC アダプターもしくはモバイルバッテリー等の電源機器で、定格出力が電圧 5V で、電流は 1A 以上のものを使用してください。誤った電源・電圧で充電すると、火災・感電や故障・事故の原因となります。また、取扱いを誤ったために生じた電源機器の故障については、弊社では責任を負いかねます。
- 充電時は、お使いになる AC アダプターやモバイルバッテリー等の電源機器に損傷がないか確認し、異常のある電源機器は絶対に使用しないでください。また使用する電源機器の取扱説明書をよく読み、正しく使用してください。
- 充電用 USB コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり束ねて使用しないでください。また、収納時にコードを本体に巻きつけないでください。感電・ショート・火災など故障や事故の原因となります。

## 警告 (つづき)

- 充電時以外及びお手入れの際は、必ず充電用 USB コードを本体及び AC アダプターなどから抜いてください。充電用 USB コードを抜き差しするときは、濡れた手で触ったりコードを引っ張らないでください。また、充電用 USB コードや端子部が破損していたり、端子部の差し込みがゆるんでいないか確認してください。感電や故障、事故の原因となります。
- 市販の AC アダプターで充電している際に停電した場合は、すぐに AC アダプターをコンセントから外してください。通電時に故障、事故の原因となります。
- 付属の充電用 USB コードは本製品専用です。他の機器には使用しないでください。
- 市販の AC アダプターを使用して充電する際は、AC アダプターが暖くなる場合があるので、布団やカーペットの上では充電しないでください。
- そばに人がいない状態で、動作または充電させないでください。
- ご使用中は幼児、子供、ペット等を近づけないでください。事故や故障の原因となります。
- ご自分で意思表示ができない方のご使用は避けてください。事故や体調不良につながる恐れがあります。
- 他の器具と同時に使用しないでください。事故やケガの原因となります。
- 用途目的以外の使用や、本書記載の使用方法以外の使い方はしないでください。
- 自動車など乗り物を運転しながら使用しないでください。
- 人体以外には使わないでください。事故や故障の原因となります。
- 浴室など湿気の多い場所では使用しないでください。また、屋外に保管しないでください。事故や故障の原因となります。
- 本製品を子供に使わせない、また子供のおもちゃのかわりに使用しないでください。また、幼児の手の届かないところに保管してください。事故や故障の原因となります。

## 注意


- 物を食べながらご使用しないでください。  
のどにものを詰ませたり、大きな事故、体調不良などを起こすことがあります。
- 食後 1 時間以内、および飲酒時などは絶対にご使用しないでください。  
大きな事故、体調不良などを起こすことがあります。
- 眠い時は使用しない、及び使用しながら眠らないでください。事故やケガと原因となります。

## ⚠ 注意 (つづき)


- 本製品を使用するときは、アクセサリ類やベルトは外してください。  
事故やケガ、破損の原因となります。
- スプレーなど(殺虫剤、整髪用、除菌用、掃除用など)をかけないでください。  
破損、変色や色落ちに原因となります。
- 通電した状態で EMS 電極パッド(通電部)を手で触れないでください。非常に強い刺激が加わり、事故やケガの原因となります。
- 汗などで手が濡れていたら、よく拭いてからリモコンを取り外してください。感電の恐れがあります。
- 本体をしっかり装着してから EMS を作動させてください。また必ず電源を切ってから本体を取り外してください。
- 腰部凸パッドが腰の中央にくるように装着してください。前後を逆に使用しないでください。
- 電極パッドと肌の間に隙間があると、正しく機能しないことがあります。  
ベルトはしっかりと締め、本体と肌を密着させてください。
- トレーニング中に、ベルトを緩めたり動かしたりしないでください。電極部が肌に密着できず、強い刺激や痛みを受ける可能性があります。
- 初めて使用する際は、必ず短時間の使用で肌や体に異常がないことを確認してください。
- 下記使用時間を目安とし、体に過度な負担がかからないようご使用ください。
  - ・ ブーストモードは1回10分まで、エアロモードは1回20分までとし、推奨使用回数は1日3回まで
  - ・ 1日の使用時間は60分以内にしてください
  - ・ 最初は1日1回、短時間の使用から始め、慣れてきたら徐々に時間や回数を伸ばすようにしてください。
- EMS の刺激に対する体感には個人差があります。初めて使用する際や、慣れるまでは必ず「レベル1」から使用してください。むやみにレベルを高くしたり、連続で何度も使用したりすると、筋肉の過度な疲労や肌のヒリヒリ感、赤み等の原因となるおそれがあります。
- 本製品はリチウム電池を使用しております。次のことに注意してください。
  - ・ 火中投入、加熱、高温・低温下での充電、使用、放置をしないでください。発熱、発火、破損の原因となります。
  - ・ 布団やこたつの中、毛布などを被せて使用しないでください。本体内部が高温になり事故や故障の原因となります。
  - ・ 長時間使用しないと機能が低下し、本体内の充電電池の故障の原因になるので長時間使用されない場合でも3ヶ月に1回程度充電してください。
  - ・ 周囲の温度が15℃～35℃の環境で充電してください。充電電池の性質上、低温や高温では充電機能が低下する場合があります。
- 本製品は洗濯機及び乾燥機は使用できません。洗う時は必ず手洗いで、洗濯後はしっかり乾かしてからご使用ください。

## 各部の名称・付属品

### ■ 本体

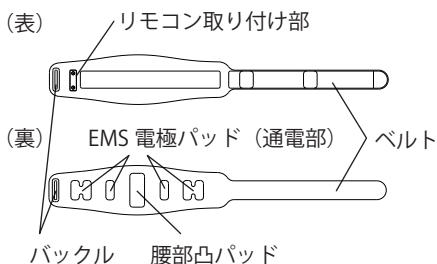


### ■ 充電用 USB コード ■ アトマイザー

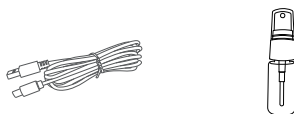

※ AC アダプターは付属していません。  
市販のものをお使いください。


### ■ リモコン

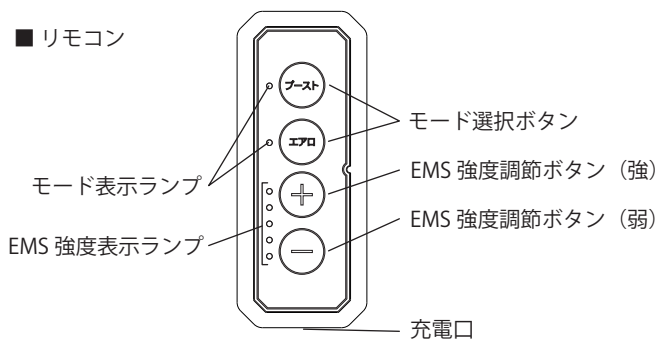

## ご使用の流れ


### STEP1

本体を装着する (P9)

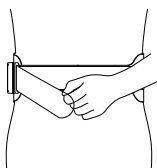


### STEP2

モードを選ぶ (P10)

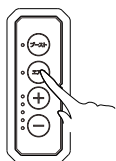

### STEP3

リモコンを取り付ける  
⇒ トレーニング開始

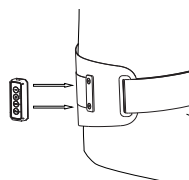


- リモコンは本体につけたまま操作することも可能です。
- リモコンを本体につけるときの、リモコン裏の凹部とリモコン取り付け部の凸部分をカチッと音がするまで取り付けてください。
- リモコンは上下どちらでも取り付け可能です。
- リモコンを本体に取り付けないと通電 (スタート) しません。

## 使用前の準備（充電）

初めてご使用になるときや、充電が切れたときはリモコンを充電してください。  
また、長時間ご使用にならなかったときは、電池が放電し動かないことがありますので、充電してからお使いください。  
※ 必ず付属の充電用 USB コードを使用してください。（AC アダプターは付属していません）

### 1 充電用 USB コードでリモコンと電源をつなぐ


充電用 USB コードの端子をリモコンの充電口と電源の USB ポートにつなぎます。

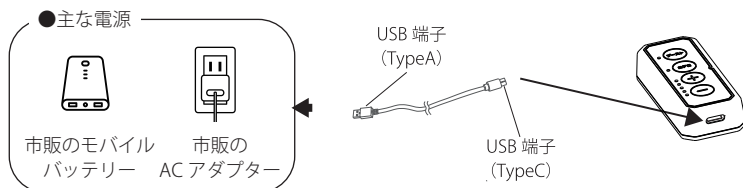

- 充電する際は、リモコンの電源が切れていることを確認してください。
- USB 端子をつなぐ際は、充電口にまっすぐ奥まで差し込んでください。
- 電源機器は、定格出力が電圧 5V で、電流は 1A 以上のものを使用してください。
- 使用する電源機器の取扱説明書をよく読み注意に従ってください。
- 電源出力が十分でない場合は、充電ができない場合があります。他の機器をお試しください。

### 2 充電開始

充電を開始すると、モード表示ランプが 2 つ同時に青色で「点滅」します。

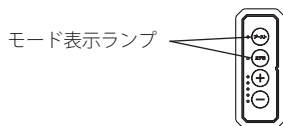

- 電池残量がない状態からフル充電までの時間は約 2.5 時間です。（DC5V、1A のアダプターで充電する場合）
- フル充電までの時間はあくまで目安であり、使用状況や電源の機種により異なります。

### 3 充電完了

モード表示ランプの青色の「点滅」が「消灯」に変わったら、充電完了です。  
充電用 USB コードをリモコンと電源から外してください。

- 充電の残量が少ない時、モード表示ランプが青で点滅します。その際はすぐに充電してください。
- 充電中は使用できません。必ず充電を完了してから使用してください。
- 初めての充電時や長期間ご使用にならなかった時は、使用できる時間が短い場合があります。充電と使用をくり返すと正常な状態に戻ります。


### 4 使用する前に、充電用 USB コードをリモコンから抜いてください。

## 装着の仕方

- 本製品は水分を通じて、電極部から肌に電気刺激を伝えるしくみです。服の上からは通電しません。必ず素肌に着用ください。
- 衣類の裾や湿布、テーピング等の上から使用しないでください。EMS 電極パッド全体が直接肌に触れない状態で使用すると、電気が均一に流れないため、強い刺激や痛み感じることがあります。
- 肌に電極パッドの使用跡がつく場合があります。
- 装着時に洋服に面ファスナーが付かないようにご注意ください。
- 本製品はお腹専用です。他の部位には使えません。

- 肌が乾燥していると、EMSを感じなかったり、ピリピリと感ずる場合があります。

付属のアトマイザー、もしくは水で濡らしてしっかり絞った布や、アルコールを含まないウェットティッシュなどで電極パッドを湿らせて、水分がある状態でご使用ください。※リモコンに水をかけないでください。

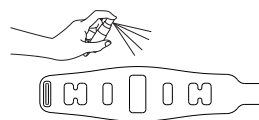


1


### 装着位置を確認する

本体を左右に開き、腰部凸パッドが、腰の中央にあたるよう位置を合わせます。

〈後ろからみたところ〉 〈横から見たところ〉

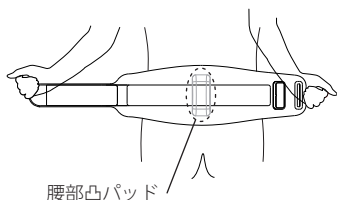

腰部凸パッド

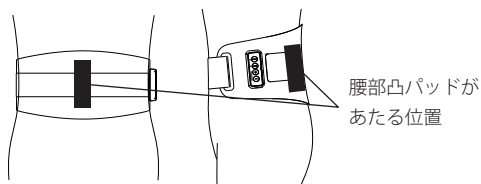

腰部凸パッドが  
あたる位置


2

### 腰に巻いて固定する

バックルにベルトを通し、折り返します。

EMS 電極パッドが腰回りにしっかりと密着するようベルトをしめます。

面ファスナーがたるまないよう上から抑えてしっかりとめてください。

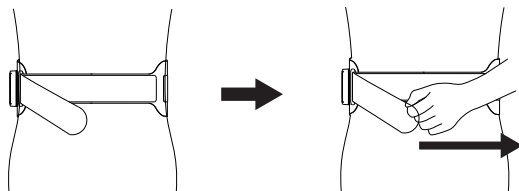

※ 電極パッドが浮きあがらずに肌にしっかりと密着するよう、ベルトの締め具合を調節してください。


肌と電極パッドの間に隙間があると、電気が均一に流れないため、強い刺激や痛みを感じることがあります。

# 使用方法

- 1回の使用時間：ブーストモード 10分以内、エアロモード 20分以内  
推奨使用回数：1日3回まで、1日の使用時間は60分以内にしてください  
※ 慣れるまでは1日1回、短時間の使用から始めてください
- 初めて使用する際や慣れるまでは、必ず「レベル1」で使用してください。
- 初めて使用する際は、必ず短時間の使用で肌や体に異常がないことを確認してください。
- 肌にEMSの強い痛みや違和感を感じた場合は使用と中止してください。
- 通電した状態で電極パッド部分を手で触れないでください。
- 本体を装着する前にEMSをスタートしないでください。
- 使用後は汗など汚れを拭き取り乾燥させてください（P11参照）

## 1 モードを選択する

モード選択ボタンを押してモードを選択します。（選択したモード表示ランプが青色で点灯します）

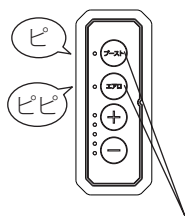

モード選択ボタン


モード	時間	内容
ブースト	10分	ブーストプレスを再現した強弱のある多彩なリズムのEMSで、集中的にお腹まわりをトレーニングするモード
エアロ	20分	一定リズムのEMSで、お腹まわりをトレーニングするモード（ながら使いにおすすめ）

## 2 EMS強度を調節する

EMS強度調節ボタンの「+」「-」ボタンでEMSの強度を選択してください。

レベル1～5まで、5段階の強度調節が可能です（強度に応じてランプが青色で1～5個点灯します）

- 初めて使用する際や、慣れるまでは必ず「レベル1」から使用してください。
- EMSの刺激に対する体感には個人差があります。むやみにレベルを上げ過ぎないようにご注意ください。

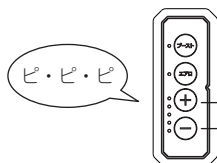

(+) ボタン：EMS強くなる

(-) ボタン：EMS弱くなる

## 3 終了する

通電スタートしてから、ブーストモードは約10分、エアロモードは約20分で自動停止します。

- 途中で止めたい時は、もう一度選択中のモードボタンを押してください。

（ピーと音となり、電源が切れます）

- 肌に通電しないまま約30秒経過すると自動停止します。
- 必ず電源を切ってから、本体を外してください。

## お手入れの仕方

使用後は、下記の方法でお手入れを行ってください。清潔な状態を保つことで導電性が維持されやすくなり、製品の安全性および性能の維持に役立ちます。


### 汗などを拭き取り乾燥させる（日常のお手入れ）

- 1 電源が切れているのを確認し、リモコンを外してください。
- 2 リモコンは、乾いたやわらかい布で汗や湿気を丁寧に拭き取ってください。
- 3 電極パッドは、ウェットティッシュや水で濡らして固くしぼったやわらかい布で汗や汚れを拭き取ります。
- 4 風通しのよい室内で陰干しし、しっかり乾燥させてください。

- 除菌・消臭スプレーを使う場合は、リモコン取り付け部（金属）及び電極パッドについての水分を必ず拭き取ってから乾燥させてください。錆や故障の原因となります。
- 電極パッドを強くこすらないでください。断線など故障の原因になります。


### 本体を手洗いする（汚れやにおいが気になる場合）※洗濯機は使用できません

- 1 電源が切れているのを確認し、必ずリモコンを外してください。
- 2 中性洗剤を溶かした水またはぬるま湯（30℃以下）に本体を入れ、手でやさしく押し洗いしてください。

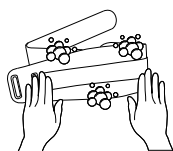


もみ洗い、こすり洗い禁止

- 3 手で押すようにして、水またはぬるま湯ですすいでください。
- 4 乾いたタオル等で押しながら水気を拭き取ってください。特に、リモコン取り付け部（金属）及び電極パッドについての水分は必ず拭き取ってください。錆や故障の原因になります。

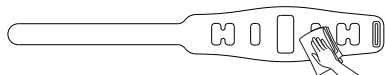

ねじり絞り禁止

- 5 直射日光を避けて日陰でぬれつり干しし、しっかり乾燥させてください。  
※ 電極パッド部分を洗濯ばさみ等ではさまないでください。断線など故障の原因になります。

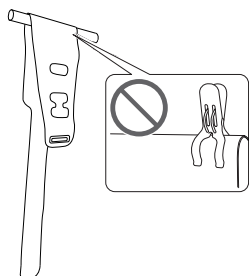

## お手入れの仕方（つづき）


- 洗濯機・脱水機及び乾燥機は使用できません。洗う時は必ず手洗いで押し洗いをしてください。(30℃以下)
- 手洗い時、もみ洗い・こすり洗い・ねじり絞りはしないでください。また電極パッドを折り曲げないでください。
- 必ずリモコンを取り外してから洗濯してください。リモコンが濡れると故障の原因になります。
- 面ファスナーが他の衣類等につかないようご注意ください。
- 衣類用の中性洗剤で洗ってください。
- 他のものと一緒に洗わないでください。
- 塩素系漂白剤、酸性洗剤、柔軟剤などは使用しないでください。
- 直射日光を避けて日陰でぬれつり干ししてください。
- アイロンはかけないでください。
- シンナー、ベンジンなどでは拭かないでください。
- ドライクリーニング・ウェットクリーニングはできません。



## 保管の仕方

本体が乾いてから、電極パッドを折り曲げないように注意して折りたたんで保管してください。

※ リモコンは取り外して保管してください。

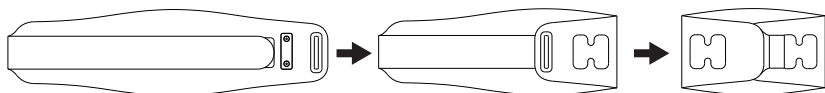

- 高温・低温（40℃以上または 7℃以下）、多湿の場所を避け、直射日光の当たらないところで保管してください。
- 火気の近くで保管しないでください。
- 洗濯後に保管する場合は、しっかり乾かしてください。湿ったまま保管するとにおいやカビ等の原因になります。
- 保管する際は、必ず充電コードをリモコンから外してください。
- 充電コードはねじれをほどこいて保管してください。また本体等に巻きつけないでください。
- 長期間で使用にならないときは、袋などに入れてホコリがつかないようにしてください。
- 幼児や子どもの手の届くところ、及びペットの近くに置かないでください。
- 本体やリモコンの上に物を置いた状態で保管しないでください。
- リモコンのボタンが押されないように保管してください。

## よくある質問

### Q. 1日に何回使ってもいいですか？

ブーストモードは1回10分まで、エアロモードは1回20分までとし、推奨使用回数は1日3回までです。最初は1日1回、短時間の使用から始め、徐々に時間や回数を伸ばすようにしてください。

### Q. EMSが弱い(感じない)

衣服の上から使用していませんか？EMSは衣服の上からは通電しません。必ず素肌にお使いください。EMSレベルが弱くなっている場合があります。⊕を押して調整してください。

肌が乾燥していませんか？電極パッドを湿らせて水分がある状態でご使用ください。

### Q. EMSが強い(痛い)

EMS強度が強くありませんか？⊖ボタンを押して調整してください。

肌にしっかり電極部分が密着しているか確認してください。

肌が乾燥していませんか？乾燥しているとピリピリ感じる場合があります。

電極パッドを湿らせて水分がある状態でご使用ください。

### Q. 使用後、生地の跡やEMS電極シートの跡が気になるのですが

肌に使用跡がつく場合があります。時間が経過すると自然に跡は消えますが、どのくらいの時間経過で跡が消えるかは個人差がございますのでご注意ください。

### Q. 使用後に肌が赤くなったり、かゆくなったりします。

長時間の使用もしくはEMS強度が強くありませんか？肌に異常を感じた場合は直ちに使用を中止し、赤みやかゆみがおさまらない場合は医師に相談してください。

## 故障かなと思ったら

修理に出す前にもう一度点検してください。

それでも正常に動作しない時は、お買い上げの販売店に修理を依頼してください。

絶対に分解したり、修理改造はしないでください。異常動作をして怪我や事故の恐れがあります。

電源が入らない	<ul style="list-style-type: none"><li>● 充電が不十分、または充電が切れていませんか？正しく充電してください。</li><li>● リモコンは本体に付いていますか？リモコンを本体に取り付けないと通電しません。</li></ul>
電源が切れる	<ul style="list-style-type: none"><li>● ブーストモードは10分、エアロモードは20分で自動停止します。</li><li>● 肌に通電しないまま30秒経過すると自動停止します。</li></ul>
モードランプが点滅する	<ul style="list-style-type: none"><li>● 充電が不足しています。正しく充電してください。</li></ul>
充電できない 充電しても使用できる 時間が短い	<ul style="list-style-type: none"><li>● 付属の充電用USBコードを使用していますか？コードが違うと充電できない場合があります。</li><li>● 周囲の温度が極端に低いまたは高い場合は、正常に動かない場合があります。周囲の温度が15℃～35℃の環境で充電してください。</li><li>● 初めての充電時や長期間ご使用にならなかった時は、使用できる時間が短い場合があります。充電と使用をくり返すと正常な状態に戻ります。</li></ul>

次のような時はただちに使用を中止して販売元にお問い合わせください。


症状	<ul style="list-style-type: none"><li>● 使用中に異音がする。</li><li>● 焦げくさいニオイがする。</li><li>● リモコンが異常に熱い。</li><li>● 本体の生地が破れた、本体やリモコンが破損した。</li><li>● 正しく使用しても、EMSが入らない。</li></ul>
----	--

## 廃棄について

本製品はリチウムイオン電池を内蔵しています。


本製品を廃棄する時は、お住いの地域で指定されている廃棄方法に則ってください。

充電残量がある場合は、本製品を動作させて電池を使い切ってください。

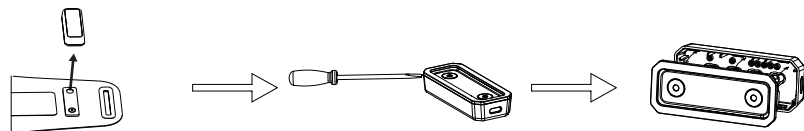

①リモコンを本体から取り外します。

②リモコンケースの隙間に工具（マイナスドライバー等）を差し込んでケースを開けてください。

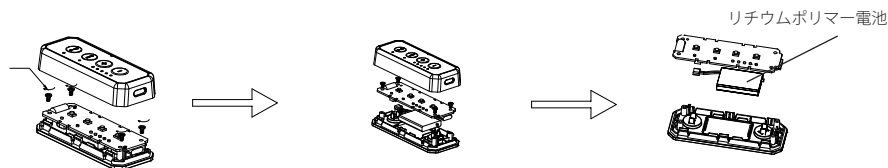

③基盤を固定するネジ4本を取り外します。

④リチウムポリマー電池のコネクターを基盤から取り外し、電池を取り出してください。

※廃棄するとき以外は、リチウムイオン電池を取り外さないでください。  
感電や故障、事故の原因になります。

※リチウムイオン電池の改造及び交換はしないでください。  
電池が古くなったら、本製品の使用を中止してください。

※取り外したネジは幼児やお子様の手の届く場所に置かないでください。誤飲の原因になります。

※リチウムイオン電池を取り外すときは、次のことに注意してください。

- ・取り外したリチウムイオン電池は、お子様の手の届かない場所に保管してください。
- ・リチウムイオン電池の液漏れや発熱によるやけどに注意してください。  
万一、漏れた液体が目に入った場合は、すぐに水で洗い流して医師の診断を受けてください。
- ・液漏れしたリチウムイオン電池は、火に近づけないでください。

※本体の廃棄について

- ・本体、リチウムイオン電池を取り外した操作盤については、一般家庭用品と同様の処理になります。  
お住いの地方自治体の処理方法に従って廃棄してください。

※リチウムイオン電池の廃棄について

- ・リチウムイオン電池はリサイクル可能な貴重な資源です。  
廃棄の際は、お住いの地方自治体の処理方法にしたがって廃棄してください。  
その場合ショートの実験がありますので、金属端子をテープ等で絶縁してください。  
処理方法の詳細内容は各地方自治体にお問い合わせください。



## 仕様

商 品 名	ブーストプレスベルト
型 番	BBB-100
外 形 寸 法 ( 約 )	幅 16.8cm× 長さ 114.7cm
重 量 ( 約 )	215g (リモコン含む)
材 質	本体:ポリエステル、ポリウレタン、導電性PU、ナイロン、SPCC (ニッケルメッキ加工) リモコン:ABS樹脂、SPCC (ニッケルメッキ加工)
充電用 USB コード長(約)	1.0m
電 源	充電式 (リチウムポリマー電池 3.7V 150mAh)
充 電 時 間	約 2.5 時間 (DC5V、1A のアダプターで充電する場合)
本 体 適 格 電 圧	DC5V
動 作 可 能 時 間	約 6 時間 (レベル 5、室温 25℃の場合)
EMS 出 力 周 波 数	4Hz、20Hz
対 応 サ イ ズ	腹囲 (約)60 ~ 105cm
推 薦 使 用 環 境 温 度	15 ~ 35℃
付 属 品	充電用 USB コード、アトマイザー、取扱説明書 (1 年間保証書付)
原 産 国	中国

●品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。

## 保証規定

品質保証書						
商品名	ブーストプレスベルト	型番	BBB-100			
お客様	ふりがな お名前	様	☎			
	〒 ご住所					
取扱販売店・住所・電話番号						
保証期間	お買上げ日	年	月	日	より	本体のみ1年間

本製品は、厳密なる品質管理及び検査を経て、お届けしたものです。お買上げの日から上記期間中故障が発生したときは、本製品と本書をお持ちいただき、お買上げの販売店または販売元にご相談ください。

所定記入欄が空欄のままですと、本書は無効となる場合がございますのでお買上げの販売店にお申し出ください。

※本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

### (無料修理規定)

- 取扱説明書の注意事項にしたがった正常な使用状態で、保証期間内に故障したときには無料修理いたします。
- 贈答品などで本書に記入してあるお買上げの販売店に修理をご依頼できないときには、販売元へお問い合わせください。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
  - (イ) 本書のご提示がないとき。
  - (ロ) 本書にお買上げ年月日、お客様名・販売店名の記入がないとき、または字句を書き換えられたとき。
  - (ハ) 使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障および損傷。
  - (ニ) 火災・公害および自身・風水害その他天災地変など外的要因がある故障および損傷。
  - (ホ) 業務用としての使用など一般家庭用以外に使用されたときの故障および損傷。
  - (ヘ) 消耗品および本体以外の付属品の消耗。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。Effective only in Japan.

この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明のときはお買上げの販売元へお問い合わせください。

### ■ 販売元

## 株式会社 ルネサンス

〒130-0026

東京都墨田区両国 2-10-14 両国シティコア

<https://www.s-renaissance.co.jp>

### ■ お客様相談室 (10:00 ~ 17:00 土日祝を除く)

☎ 0120-371-719

✉ [proshop@s-renaissance.co.jp](mailto:proshop@s-renaissance.co.jp) (24 時間受付)